



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-L-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	AM-OSN-L-02
CODE	AM-OSN-L-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	AM-OSN-L-02




- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę.
EN: Place the brace on the limb.

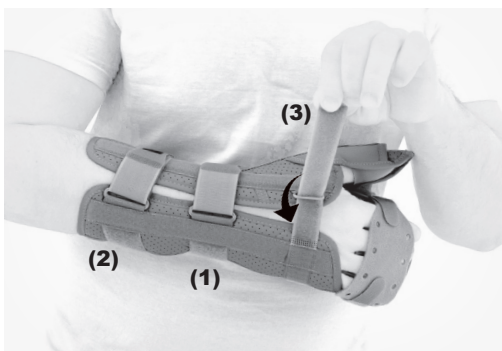

- 2. PL:** Zapnij taśmy obwodowe przedramienia (1 i 2) i taśmę nadgarstka (3).
EN: Fasten the wrap-around straps on the forearm (1 and 2) and wrist strap (3).

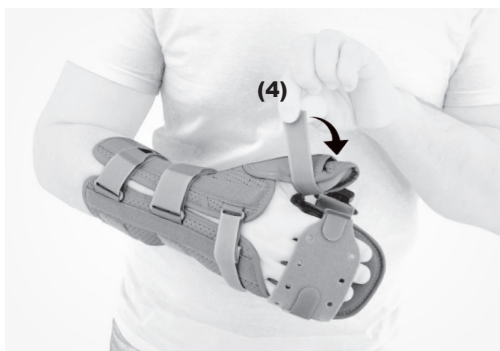

- 3. PL:** Zapnij taśmę obwodową kciuka (4).
EN: Fasten the thumb-around strap (4).

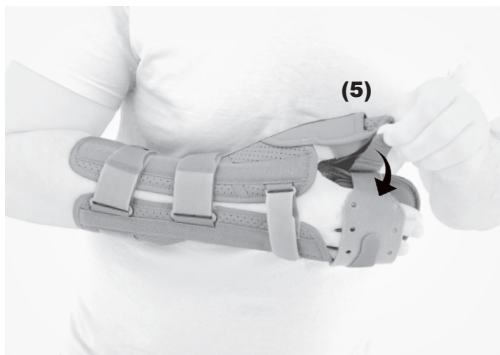


- 4. PL:** Zapnij osłonę palców (5).
EN: Fasten the finger strap (5).




4. PL: Za pomocą kluczyka imbusowego ustaw odpowiednią pozycję dłoni.

EN: Adjust the required hand position with the Allen key.

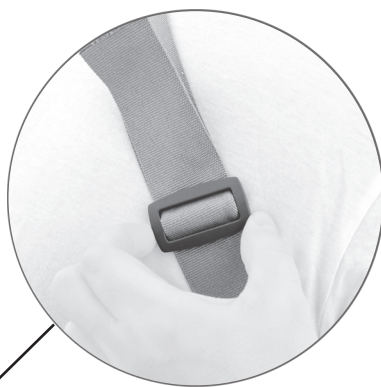

PL: Ustaw odpowiednią długość pasa barkowego.

EN: Adjust the required length of the shoulder strap.

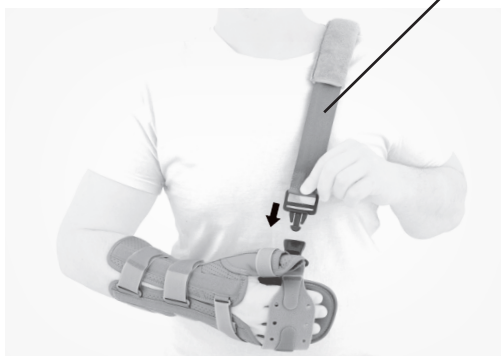

5. PL: Przytnij pasek do ortozy. Przełóż pasek przez ramię i zapnij karabińczyk.

EN: Clip the strap to the brace. Place the belt through the shoulder and fasten the clasp.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.