

| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AS-B |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| MODEL | AS-B |
| | |
| CODE | AS-B |
| TRADE NAME | UPPER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | AS-B |



1. PL: Umieść ortezę (1) na ramieniu .
EN: Place the brace (1) on the shoulder.



2. PL: Zapnij rzep ramienny (2).
EN: Fasten the shoulder Velcro (2).



3. PL: Umieść osłonę (3) pod pachą.
EN: Place the cover (2) under your armpit.



4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu, zapinając pas piersiowy z tyłu (4) i z przodu (5) na rzepy.
EN: Set the correct compression of the product by fastening the strap at the back (4) and front (5) with Velcro.



5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.