

RU



AS-PU-01

## ОРТЕЗ ГОЛЕНИ С ЗАЩИТНЫМ ВКЛАДЫШЕМ

### ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Бандаж голени относится к группе ACTIV SPORT, он выполнен из инновационного материала ACTIV PREN, характеризующегося мягкостью и высокой эластичностью, что безусловно облегчает прилегание изделия к телу и гарантирует оптимальную компрессию группы мышц голени. ACTIV PREN структурный материал, состоящий из перфорированной неопреновой пены и полиамидовых трикотажей. Благодаря перфорации, охраняемая область дополнительно вентилируется, а также удерживается естественная температура. Отличительной чертой этого материала является то, что он нетканый, он не имеет грубых волокон, и благодаря этому сплетения трикотажа не отпечатываются на коже пациента и не оставляют следов в области большей компрессии.

ACTIV PREN имеет в середине свободную мембрану выполненную из микрофибры, которая впитывает влагу с тела пациента, пропускает ее в пространство между ней и основным материалом, а оттуда порами в неопрене влага испаряется. Такая конструкция сырья гарантирует, что только минимальное количество пота находится на поверхности кожи, и позволяет на использование наших ортезов в экстремальных условиях - напр. во время активного спорта.

### ОСОБЕННОСТИ

Защищает голень и стопу от травмирования в контактных видах спорта. Уменьшает боли в мышцах голени, вызванных растяжением и травмами. Благодаря поддержке

Дает возможность быстрого возвращения к тренировкам и спорту. Показания и область применения назначает лечащий врач

### ПОКАЗАНИЯ

- Профилактически — защищает голень в контактном спорте
- Применяется при болях мышц голени на фоне растяжений (тренировки, перегрузки) и после травмирования (напр. после разрыва связок).
- При опухолях голени вызванных травмами или растяжениями (слишком интенсивные тренировки, перегрузка)

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В случае появления опухолей стопы использование ортеза возможно только поверх правильно подобранных чулок или гольф. В случае кожных изменений в местах прилегания ортеза (натирание эпидермиса, ранения, кожной экземы) обязателен контакт с врачом. Использование ортеза ограничено - возможно после наложения повязки

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Только правильно заложенный и подобранный бандаж исполняет заданную функцию - неправильное применение может привести к усилению боли со стороны сустава, ухудшению работоспособности, нарушению походки, появлению кожных изменений, опухолей голени и стопы, возникновению варикозного расширения вен и воспалительных состояний сухожилий. Инструкцию по заложению уделяет лечащий врач или подготовленный мед. персонал. В случае сопутствующего венозного расширения, воспаления вен, опухолей нижних конечностей применение бандажа может быть ограничено или противопоказано (согласно рекомендации врача). Не следует одевать ортез непосредственно после применения мази, кремов и лечебных гелей.

В случае появления кожных изменений в местах прилегания бандажа (натирание эпидермиса, ранения, кожной экземы) использование возможно только на повязку.

В случае появления аллергических изменений на коже необходим контакт с врачом.

Неправильная консервация изделия, нетщательная стирка и полоскание могут вызвать повреждение эпидермиса, натирания или возникновение аллергических реакций связанных с усиленной потливостью и развитием бактериальной флоры.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Стирать вручную в теплой воде с добавлением мыла в температуре 30 градусов
- Не гладить.
- Не использовать хлорсодержащих отбеливателей
- Сушить вдали от источников тепла.

### СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556 Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

☞ 2012

**REH4MAT**  
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński  
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.  
POLAND  
tel.: +48 (17) 851 66 30;  
tel./fax: +48 (17) 851 62 23  
e-mail: biuro@reh4mat.com  
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

### ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,  
fax +48 017 864-04-71;



Дата актуализации: UL-AS-PU-01/03-2012