

**RU****AS-PU**

## АНАТОМИЧЕСКИЙ ОРТЕЗ ГОЛЕНИ

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Ортез голени относится к группе ACTIV SPORT, он изготовлен из инновационного материала ACTIV PREN, обладающего мягкостью и высокой эластичностью, благодаря этому повязка лучше прилегает к конечности, что обеспечивает правильную компрессию. Это конструкционный материал, состоящий из перфорированной неопреновой пенки и полиамидных трикотажных полотен снаружи и внутри. Благодаря перфорации, защищенный сустав дополнительно вентилируется при одновременной поддержке соответствующей его теплоты. Очень важным преимуществом этого материала является то, что это не трикотажное изделие, не состоит из толстых волокон, поэтому переплетения ткани не оставляют следов на коже пациента и не вызывают повреждений в области сильного сжатия. ACTIV PREN имеет внутри свободную мембрану из микрофибры, которая впитывает пот, выводит его в область между ней и основным материалом, откуда через поры в неопреновой пенке пот испаряется. Такая структура материала дает гарантию, что на коже пациента остается лишь минимальное количество пота, что позволяет использовать наши ортезы в экстремальных условиях – например во время занятия спортом.

### СВОЙСТВА

Благодаря поддержанию стабильной температуры и эластической компрессии он облегчает боль, уменьшает отеки, способствует рассасыванию гематом. Это позволяет

### ПОКАЗАНИЯ

- при комплексных болях мышц голени, вызванных травмами или перенапряжением (чрезмерными тренировками или тяжелой физической работой)

- при отеках голени, вызванных перенесенными травмами либо перегрузкой (чрезмерными тренировками или тяжелой физической работой);

- для профилактики - ортез защищает голень

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В случае появления отеков стопы, использование ортеза возможно только после наложения правильно подобранных антиварикозных гольфов II-й степени компрессии. В случае кожных изменений в местах прилегания (повреждения кожного покрова, раны, экземы кожи), необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Использование изделия ограничено – возможно после наложения бинтовой повязки.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Только правильно наложенный и подобранный ортез выполняет назначенную функцию - неправильное использование может привести к усугублению недомоганий в области сустава с ухудшением эффективности ходьбы, появлению изменений кожи, отеков голени и стопы, к появлению варикозного расширения и воспаления вен - инструкции по наложению дает лечащий врач или квалифицированный специалист по реабилитации.

При сопутствующих варикозных расширениях вен в области голени, при перенесенных воспалениях глубоких вен, отеках нижних конечностей – использование ортеза следует ограничить (проконсультировавшись с врачом) либо прекратить.

Не следует использовать ортез непосредственно после применения мази, крема или лечебного геля.

В случае появления кожных изменений в местах прилегания ортеза (повреждений кожного покрова, ран, экземы кожи) использование ортеза возможно только сверху на бинтовую повязку. В случае появления кожных изменений аллергического характера связанных с применением ортеза, следует обратиться к врачу. Отсутствие повседневной личной гигиены или неправильное хранение ортеза (нетщательная стирка и полоскание) могут вызвать повреждение кожного покрова, опрелость или аллергические реакции, связанные с повышенной потливостью и развитием бактериальной флоры.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Ручная стирка в теплой мыльной воде при температуре до 30 градусов.
2. Не гладить.
3. Не обрабатывать хлором.
4. Сушить вдали от источников тепла.



Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556  
Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

© 2012

**REH4MAT**  
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński  
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.  
POLAND  
tel.: +48 (17) 851 66 30;  
tel./fax: +48 (17) 851 62 23  
e-mail: biuro@reh4mat.com  
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

### ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,  
fax +48 017 864-04-71;



Дата актуализации: UL-AS-PU/03-2012