




## INSTRUKCJA REGULACJI KĄTA ZGIĘCIA I WYPROSTU ORTEZY/APARATU Z SZYNAMI DWUOSIOWYMI 2R

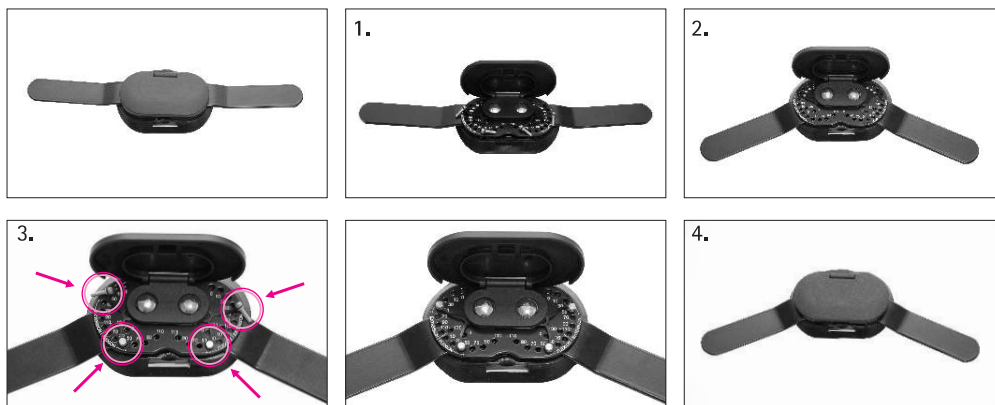

**KĄT ZGIĘCIA LUB WYPROSTU USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB REHABILITANT**

1. Kłapkę zabezpieczającą (pokrywę) podnieść (otworzyć) podważając w miejscu zaczepu.
2. Nastawić zalecany kąt zgięcia lub wyprostu.
3. Zablokować ramiona szyny (dwustronnie) wkładając we właściwe otwory 4 nity blokujące.
4. Zamknąć kłapkę (pokrywę) zatrzaskując zaczep.

### UWAGA:

PRZED USTAWIENIEM KĄTA ZGIĘCIA LUB WYPROSTU, ZALECA SIĘ ZAŁOŻYĆ WYRÓB NA KOŃCZYNĘ

Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach bocznych, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprostu (punkt 1-4).

Szyny boczne nie wymagają konserwacji.

Termin ważności: NIE OKREŚLA SIĘ 2013  
Okres gwarancji: 24 MIESIĘCE OD DATY ZAKUPU

Konsultant Med: tel. 508 382 509




Podstawa dopuszczenia do obrotu:  
Produkt został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów  
Lecniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
Wyrób klasy I



REH4MAT Sławomir Wroński  
ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Młp., Polska  
tel. +48 16 621 42 20; fax +48 16 621 42 13  
e-mail: biuro@reh4mat.com, www.reh4mat.com



## INSTRUCTION HOW TO ADJUST THE ANGLE OF BENDING AND STRAIGHTENING OF THE ORTHESIS / APPARATUS WITH DOUBLE AXIS SPLINT 2R

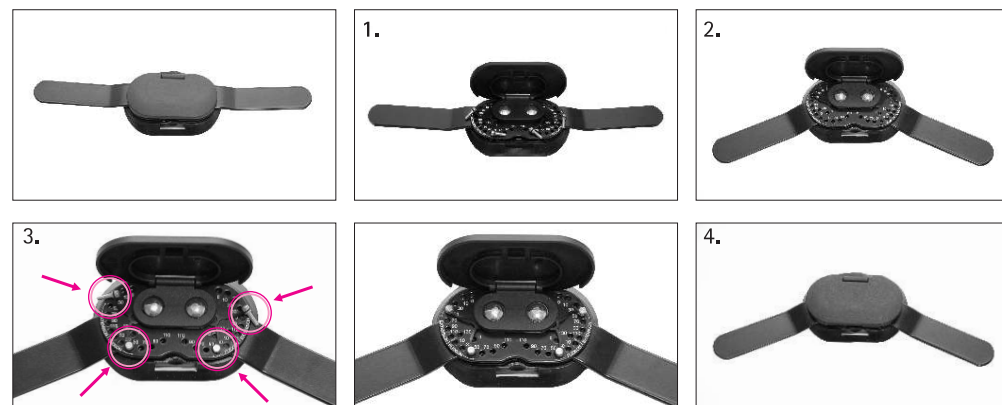

**THE ANGLE OF BENDING AND STRAIGHTENING IS SPECIFIED BY THE DOCTOR OR PHYSIOTHERAPIST**

1. Open the securing cup by lifting it in the place of attachment;
2. Adjust required angle of bending or straightening;
3. Lock the splint (on both sides) inserting into correct holes 4 locking rivets;
4. Close the cup (clicking sound).

### ATTENTION:

First put the device on the limb than adjust the angle of bending and straightening.

If the orthosis is equipped with 2 side splints, adjustment is done on each side splint separately, setting the same angle of bending and straightening on both splints (point 1-4).

Side splints do not require maintenance.

Expiry date - IS NOT DETERMINED. 2013

Guarantee period - 24 months from the date of purchasing.



Admitted on the market: product registered  
in the Department of Registration of Healing Products,  
Medical Products and Biocide Products.


Medical product first class



REH4MAT Sławomir Wroński  
ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Młp., Poland  
tel. +48 16 621 42 20; fax +48 16 621 42 13  
e-mail: biuro@reh4mat.com, www.reh4mat.com



## INSTRUKCJA REGULACJI KĄTA ZGIĘCIA I WYPROSTU ORTEZY Z SZYNAMI JEDNOOSIOWYMI 1-R

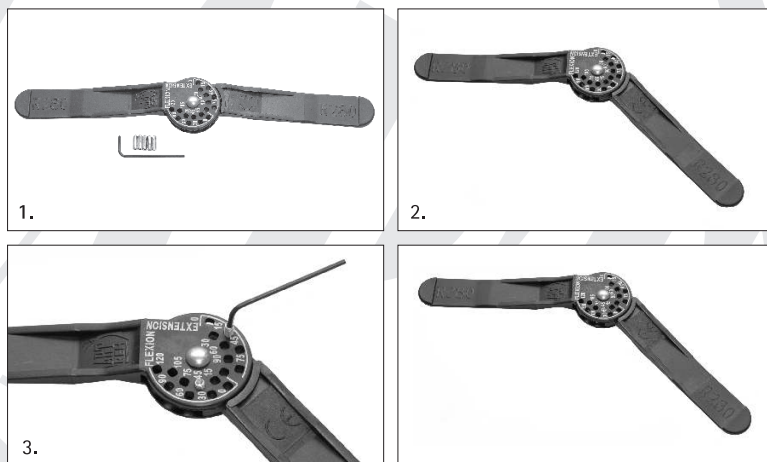

### KĄT ZGIĘCIA LUB WYPROSTU USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB REHABILITANT

1. Szyna oraz klucz imbusowy wraz z kompletem wkrętów.
2. Ustawić zalecany kąt zgięcia lub wyprostu.
3. Wkręcić przy pomocy kluczyka imbusowego wkręty w otwory znajdujące się przy zewnętrznym i wewnętrznym okręgu opisanym na tarczy zegara.

**UWAGA:**  
PRZED USTAWIENIEM KĄTA ZGIĘCIA LUB WYPROSTU, ZALECA SIĘ ZAŁOŻYĆ WYRÓB NA KOŃCZYNĘ  
Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach bocznych, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprostu (punkt 1-3).  
Szyny nie wymagają konserwacji.

Termin ważności: NIE OKREŚLA SIĘ  2010  
Okres gwarancji: 24 MIESIĘCE OD DATY ZAKUPU


Konsultant Med: tel. 508 382 509

Podstawa dopuszczenia do obrotu:  
Produkt został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów  
Lecznictwa, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
Wyrób klasy I

 REH4MAT Sławomir Wroński  
ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Młp.  
tel.: +48 (17) 851 66 30, tel/fax: +48 (17) 851 62 23  
e-mail: [biuro@reh4mat.com](mailto:biuro@reh4mat.com); [www.ortezy.pl](http://www.ortezy.pl)




## INSTRUKCJA REGULACJI KĄTA ZGIĘCIA I WYPROSTU ORTEZY Z SZYNAMI JEDNOOSIOWYMI 1-R

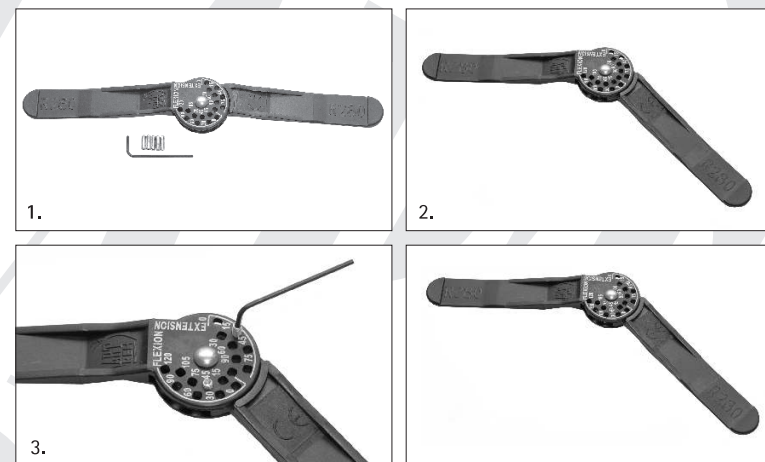

### KĄT ZGIĘCIA LUB WYPROSTU USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB REHABILITANT

1. Szyna oraz klucz imbusowy wraz z kompletem wkrętów.
2. Ustawić zalecany kąt zgięcia lub wyprostu.
3. Wkręcić przy pomocy kluczyka imbusowego wkręty w otwory znajdujące się przy zewnętrznym i wewnętrznym okręgu opisanym na tarczy zegara.

**UWAGA:**  
PRZED USTAWIENIEM KĄTA ZGIĘCIA LUB WYPROSTU, ZALECA SIĘ ZAŁOŻYĆ WYRÓB NA KOŃCZYNĘ  
Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach bocznych, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprostu (punkt 1-3).  
Szyny nie wymagają konserwacji.

Termin ważności: NIE OKREŚLA SIĘ  2010  
Okres gwarancji: 24 MIESIĘCE OD DATY ZAKUPU

Konsultant Med: tel. 508 382 509

Podstawa dopuszczenia do obrotu:  
Produkt został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów  
Lecznictwa, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
Wyrób klasy I

 REH4MAT Sławomir Wroński  
ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Młp.  
tel.: +48 (17) 851 66 30, tel/fax: +48 (17) 851 62 23  
e-mail: [biuro@reh4mat.com](mailto:biuro@reh4mat.com); [www.ortezy.pl](http://www.ortezy.pl)

