



AM-KG-AM/1RE

РЕДРЕССИРУЮЩИЙ АППАРАТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА С ЗАХВАТОМ КИСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Модульный аппарат верхней конечности изготовлен из современной ткани ActivDistance II со свойствами липучки. Изделие состоит: из анатомически профилированного внешнего алюминиевого каркаса оснащенного - ладонной частью шины изогнутой с учетом анатомии кисти и стабилизирующими лентами VELCRO, из ортопедической шины, сделанной из углеродных волокон с регулируемым углом сгибания и разгибания по 15 градусов, из стабилизирующих лент VELCRO и плечевого рукава. Каркас покрыт порошковым лаком с повышенной стойкостью. Дополнительно использованы ленты, стабилизирующие кисть и фиксирующие пальцы ладони за исключением большого пальца. Аппарат защищает всю верхнюю конечность, межфаланговые и запястно-фаланговые суставы, запястный и локтевой суставы.

СВОЙСТВА

1. Превосходная стабилизация - благодаря применению профилированной ложки запястья и предплечья, а также шины из углеродных волокон и алюминиевой шины была достигнута превосходная стабилизация верхней конечности.
 2. Комфорт ношения - благодаря применению трикотажа, ажурных лент и пелот, кожа верхней конечности дышит правильно, и пот превосходно выводится наружу.
 3. Удобство использования - достаточно легко накладывается и снимается самим пациентом.
- Поддержка надлежащей гигиены - благодаря удобству наложения и снятия модульного аппарата, пациент может с легкостью стирать элементы ортеза, а также поддерживать надлежащую гигиену верхней конечности.

ПОКАЗАНИЯ

Модульный аппарат верхней конечности может быть использован в случаях:

- после внутрисуставных переломов локтя,
- посттравматических повреждений совместно запястного и локтевого суставов,
- острых воспалений запястного и локтевого суставов,
- осколочного перелома верхней конечности в период выздоровления после снятия гипсовой повязки,
- воспаления костей верхних конечностей требующего иммобилизации - в острой стадии,
- в процессе восстановления и выздоровления,
- неврологических заболеваниях центрального и периферического происхождения, после других операций (хирургия, ортопедия)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аппарат не следует использовать в случаях:

- повреждений, требующих наложения гипсовой повязки
- свежих ран
- повреждения кожного покрова
- экземы кожи
- аллергии кожи

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

1. Применять строго согласно рекомендациям и под присмотром врача.
2. Изделие должно быть впервые наложено пациенту самим врачом или квалифицированным медицинским персоналом.
3. Не использовать модульный аппарат, если до этого применено мазь или разогревающий гель.
4. Неправильное использование изделия или неправильно подобранный размер могут вызвать временное нарушение артериально-венозного кровообращения, привести к травмированию охраняемого сустава, к появлению кожных заболеваний и др. Отсутствие повседневной личной гигиены или неправильное хранение и стирка изделия могут привести к повреждению кожного покрова или вызвать аллергические реакции, связанные с повышенной потливостью и развитием бактериальной флоры.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Ручная стирка в теплой мыльной воде при температуре до 30 градусов.
2. Не гладить.
3. Не обрабатывать хлором.
4. Сушить вдали от источников тепла.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед стиркой демонтировать боковые и задние фиксаторы.

СОСТАВ

Трикотаж ActivDistance II, алюминиевая ложка, ортопедические шины, ленты VELCRO, полиамидные застежки, полиуретановая пенка.

ШИНЫ 1RE

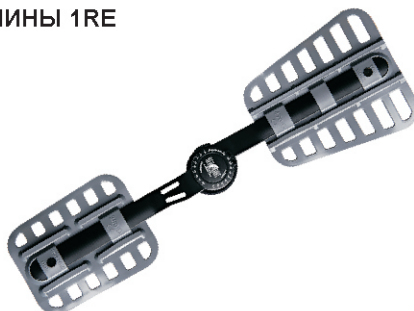

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556
Для каждого изделия производитель предвдвляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

☞ 2011

REH4MAT
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

