



AM-KG-AR/1R

РЕДРЕССИРУЮЩИЙ АППАРАТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Редрессирующий аппарат верхней конечности состоит из:

1. Двух открытых рукавов - плеча и предплечья - способствующих легкому их наложению и точному подбору соответственно размерам окружностей верхней конечности.
2. Ортопедических шин с системой их фиксации.
3. Набора лент VELCRO.

Изделие оснащено одноосными боковыми шинами, изготовленными из высококачественного пластика армированного углеродными волокнами. Система шин в аппарате и особая их эластичность способствуют надлежащему прилеганию изделия к охраняемой конечности, и позволяют получить превосходную фиксацию охраняемого локтевого сустава. Шины снабжены специальными часами, позволяющими регулировать угол сгибания и разгибания по 15 градусов. Такая точная регулировка изделия, несомненно, улучшает процесс восстановления поврежденного локтевого сустава. Эти шины обеспечивают боковую фиксацию конечности; в них установлена система независимых креплений к рукавам плеча и предплечья, что позволяет индивидуально, легко и точно подобрать место прикрепления шин к мягкой части аппарата. Система лент VELCRO устанавливает изделие в нужном положении, обеспечивает более точное прилегание аппарата к конечности и более эффективную фиксацию охраняемого сустава. С внутренней стороны изгиба дополнительно установлено мягкие подушечки для защиты локтя от травм.

СВОЙСТВА

1. Превосходная фиксация - благодаря применению двух наборов ортопедических шин была достигнута отличная стабилизация изделия.
 2. Комфорт ношения - благодаря применению трикотажа ActivDistance II для изготовления рукавов, во время использования изделия не происходит повреждение кожного покрова.
 3. Удобство использования - аппарат легко накладывается и снимается самим пациентом.
- Поддержка надлежащей гигиены - за счет легкости демонтажа изделия нет трудностей со стиркой и его хранением.

ПОКАЗАНИЯ

Редрессирующий аппарат следует использовать в случае:

- контрактуры сгибания и разгибания локтевого сустава,
- неустойчивости локтя после травм,
- в период выздоровления после переломов, после других операций (ортопедия).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Аппарат не следует использовать в случаях:

- свежих ран
- повреждения кожного покрова
- экземы кожи
- аллергии кожи

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

1. Применять строго согласно рекомендациям и под присмотром врача.
 2. Изделие должно быть впервые наложено пациенту самим врачом или квалифицированным медицинским персоналом.
 3. Неправильное использование изделия или слишком сильное сжатие обездвиживающей лентой могут вызвать временное нарушение артериально-венозного кровообращения, привести к травмированию охраняемого сустава, к появлению кожных заболеваний и др.
- Отсутствие повседневной личной гигиены или неправильное хранение и стирка изделия могут привести к повреждению кожного покрова или вызвать аллергические реакции, связанные с повышенной потливостью и развитием бактериальной флоры.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Ручная стирка в теплой мыльной воде при температуре до 30 градусов.
2. Не гладить.
3. Не обрабатывать хлором.
4. Сушить вдали от источников тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед стиркой

демонтировать боковые шины вместе с системой крепления.

СОСТАВ

Трикотаж ActivDistance II, алюминиевая ложка, ортопедические шины, ленты VELCRO, полиамидные застежки, полиуретановая пенка.


ШИНЫ 1R



СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 - удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Препаратов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556 Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН
 2011



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
 ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
 POLAND
 tel.: +48 (17) 851 66 30;
 tel./fax: +48 (17) 851 62 23
 e-mail: biuro@reh4mat.com
 www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
 fax +48 017 864-04-71;

