



AM-OSN-L-01

ДЛИННЫЙ ЖЕСТКИЙ ОРТЕЗ ЛАДОНИ И ПРЕДПЛЕЧЬЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Шина на ладонь и предплечье выполнена из современного материала ActiveSpace. Изделие оснащено анатомически смоделированной алюминиевой ложкой, а также двумя боковыми ребрами жесткости фиксирующими запястье, лучезапястный сустав и частично предплечье. Изделие снабжено четырьмя фиксирующими ремнями, изготовленными из ленты VELCRO, задачей которых является оптимально подогнать шину по размеру конечности и зафиксировать его на руке. Благодаря материалу ActiveSpace гарантирован эффект сухой кожи. Большой палец остается свободным.

СВОЙСТВА

1. Превосходная стабилизация - благодаря применению широкой и жесткой ортопедической вставки и двух вкладышей была достигнута превосходная стабилизация изделия.
2. Комфорт ношения - благодаря применению современного трикотажа ActiveSpace пот превосходно выводится наружу.
3. Удобство использования - достаточно легко накладывается и снимается самим пациентом. Поддержка надлежащей гигиены - благодаря удобству наложения и снятия изделия, стирка и хранение ортеза не представляют особых трудностей, пациент может всегда постирать изделие и соблюдать гигиену верхней конечности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Шину на ладонь и предплечье следует применять в случаях:

- вывихов лучезапястного сустава,
- повреждения и воспаления сухожилий,
- болезненных состояний запястья,
- острых или хронических воспалений запястья или пястных костей,

- после других операций (ортопедия, ревматология),
- неврологических заболеваний центрального или периферического происхождения,
- при трещинах кости не требующих наложения гипсовой повязки

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Шины не следует применять в случае:

- свежих ран
- повреждения эпидермиса
- экземы кожи
- аллергии кожи

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

1. Применять строго согласно рекомендациям и под присмотром врача.
 2. Изделие должно быть впервые наложено пациенту самим врачом или квалифицированным медицинским персоналом.
 3. Не использовать тугор, если до этого применено мазь или разогревающий гель.
 4. Неправильное использование изделия или тугое затягивание могут вызвать временное нарушение артериально-венозного кровообращения, привести к травмированию охраняемого сустава, к появлению кожных заболеваний и др.
- Отсутствие повседневной личной гигиены или неправильное хранение и стирка изделия могут привести к повреждению кожного покрова или вызвать аллергические реакции, связанные с повышенной потливостью и развитием бактериальной флоры.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


1. Ручная стирка в теплой мыльной воде при температуре до 30 градусов.
2. Не гладить.
3. Не обрабатывать хлором.
4. Сушить вдали от источников тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед стиркой снять алюминиевый вкладыш.

СОСТАВ

Трикотаж ActiveSpace, алюминиевая вставка, ленты VELCRO, полиамидные застежки, эластан.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ

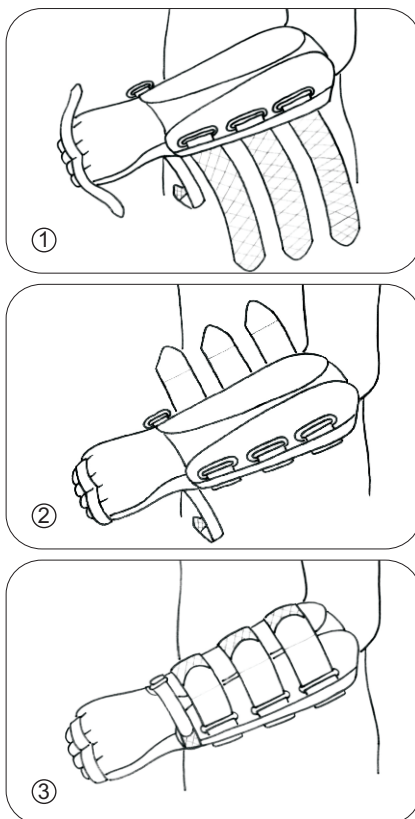

Изделие медицинского назначения кл.

1 – удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG.

Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556

Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

2012



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

