



AM-SŁ

ОРТЕЗ НА ЛОКОТЬ ТЕННИСИСТА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Ортез локтевого сустава относится к группе CUBITI STABILIZER, он изготовлен из материала ACTIV SPACE. Инновационная технология позволяет расположенной в повязке воздушной камере сфокусировать давление на мышцы и сухожилия, пораженные эпикондилитом (хроническое воспаление). Клинические исследования показали, что более 80% пациентов применяющих этот ортез ощущают заметное улучшение. Благодаря сжимающей подушечке ортеза AM-SŁ давление направлено на проксимальные крепления разгибательных и сгибательных мышц предплечья и кисти. Снижает риск перегрузки или надрыва, а в случае появления недомоганий улучшает и ускоряет заживление. Внутренняя подушечка имеет силиконовые шипы, выполняющие микро массаж во время ношения; полиамидная пряжка и лента VELCRO улучшают регулирование силы сжатия. Внутренняя укрепляющая вставка равномерно распределяет силу сжатия предплечья.

СВОЙСТВА

Уменьшает нагрузку на крепления мышц предплечья и кисти на уровне локтевого сустава. Косвенно ортез придает силу особенно при вращательном движении предплечья

ПОКАЗАНИЯ

- при комплексных болях локтевого сустава (чаще всего связанных с перенапряжением или надрывом креплений мышц) на уровне латерального и медиального надмыщелков плечевой кости – «локоть теннисиста»;
- для профилактики и лечения – теннис, гольф, бадминтон, командные игры в спортивном зале;
- для профилактики и лечения при тяжелых физических работах требующих вращательных движений предплечья (например, закручивание шурупов).

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ

Для прикрепления повязки вокруг предплечья достаточно одной руки. Ортез универсален - правосторонний и левосторонний. Отстегнуть ортез и наложить на предплечье так, чтобы во время движений он прилегал к телу и сжимал сухожилия. В зависимости от потребности, внутреннюю подушку приложить силиконом с медиальной стороны («локоть игрока в гольф») или с латеральной стороны («локоть теннисиста»).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

В случае появления кожных изменений аллергического характера в местах прилегания ортеза, следует обратиться к врачу. Не следует использовать стабилизатор после применения мази, крема или разогревающего геля.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Ручная стирка в теплой мыльной воде при температуре до 30 градусов – ТЩАТЕЛЬНО ПРОПОЛОСКАТЬ
2. Не гладить.
3. Не обрабатывать хлором.

Сушить вдали от источников тепла.

СОСТАВ

Материал ACTIV SPACE, полиамидная пряжка, силикон, лента VELCRO, пластина PELD.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556 Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

☞ 2011

REH4MAT
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;



5 19 07 43 91 12 30 25 11



Дата актуализации: UL-AM-SŁ/11-2011