

RU



AM-SOB

## РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОРТЕЗ НА РУКУ И ПЛЕЧО

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Ортез на плечо и локоть изготовлен из инновационного материала ACTIV PREN, обладающего мягкостью и высокой эластичностью, благодаря этому повязка лучше прилегает к конечности, что обеспечивает правильное сжатие плечевого сустава. Это конструкционный материал, состоящий из перфорированной неопреновой пенки и полиамидных обкладочных трикотажных тканей. Благодаря перфорации, защищенный сустав дополнительно обеспечен вентиляцией при одновременной поддержке соответствующей его теплоты. Очень важным преимуществом этого материала является то, что это не обычное трикотажное изделие и не состоит из толстых волокон, поэтому переплетения ткани не оставляют следов на коже пациента и не вызывают повреждений в области сильного сжатия. ACTIV PREN имеет внутри свободную мембрану из микрофибры, которая впитывает пот, выводит его в область между ней и основным материалом, откуда через поры в неопреновой пенке пот испаряется. Такая структура материала дает гарантию, что на коже пациента остается лишь минимальное количество пота, что позволяет использовать наши ортезы в экстремальных условиях – например во время занятия спортом. Анатомическая форма изделия и наличие разных размеров способствуют превосходному прилеганию к телу пациента. В изделии использовано систему трех лент, дающих возможность регулировать диапазон движений; ортез универсален – подходит для правой и левой руки

### СВОЙСТВА

Ортез обездвигивает плечевой и плечелючичный суставы и лопатку. Утепляет плечо, выполняет защитную функцию в контактных видах спорта. Указания по применению и принципы использования ортеза определяет лечащий врач.

### ПОКАЗАНИЯ

- при посттравматическом консервативном и хирургическом лечении повреждений плечевого, плечелючичного и локтевого суставов
- при острых и хронических болевых синдромах плечевого сустава и плеча в стадии посттравматических и дегенеративных изменений, и болезненных процессов
- при предрасположенности к вывихам плечевого сустава

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В случае усиливающихся болевых ощущений в период использования ортеза необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. В случае кожных изменений в местах прилегания ортеза (повреждения кожного покрова, раны, экземы кожи), использование изделия возможно после наложения бинтовой повязки. Необходимо особо контролировать правильное применение ортеза согласно рекомендациям врача - у детей, людей с нарушением памяти и психически больных.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Только правильно выбранный, подобранный и примененный согласно рекомендациям лечащего врача ортез, выполняет назначенную функцию - инструкции по наложению дает лечащий врач или квалифицированный специалист по реабилитации. Ортез следует накладывать сверху на хлопчатобумажную футболку - это предотвращает появление повреждений кожного покрова, опрелости. При высокой температуре окружающей среды и у лиц с нарушениями чувствительности необходим периодический контроль состояния кожи в местах прилегания ортеза и в подмышечной впадине.

Длительное использование ортеза может привести к ограничению объема активных и пассивных движений в плечевом суставе. Если нет противопоказаний, рекомендуется несколько раз в сутки выполнять пассивные упражнения в плечевом суставе. Упражнения подбираются индивидуально для каждого пациента квалифицированным специалистом по реабилитации по поручению лечащего врача.

Кожа в местах прилегания ортеза должна быть чистой (не следует использовать мази, кремы, лечебные компрессы непосредственно перед наложением ортеза). Неправильное хранение ортеза - слишком редкая стирка и нетщательное полоскание после моющих средств могут привести к появлению кожных изменений, связанных с повышенной потливостью под ортезом.


### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Ручная стирка в теплой мыльной воде при температуре до 30 градусов.
2. Не гладить.
3. Не обрабатывать хлором.
4. Сушить вдали от источников тепла.

### СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 - удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556 Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН  
 2012

**REH4MAT**  
 MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński  
 ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.  
 POLAND  
 tel.: +48 (17) 851 66 30;  
 tel./fax: +48 (17) 851 62 23  
 e-mail: biuro@reh4mat.com  
 www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

### ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,  
 fax +48 017 864-04-71;



Дата актуализации: UL-AM-SOB/03-2012