



AS-B

## АНАТОМИЧЕСКИЙ ОРТЕЗ НА РУКУ И ПЛЕЧО

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Ортез локтя относится к группе ACTIV SPORT, он изготовлен из инновационного материала ACTIV PREN, обладающего мягкостью и высокой эластичностью, благодаря этому повязка лучше прилегает к конечности, что обеспечивает правильное сжатие локтевого сустава. Это конструкционный материал, состоящий из перфорированной неопреновой пенки и полиамидных обкладочных трикотажных тканей. Благодаря перфорации, защищенный сустав дополнительно обеспечен вентиляцией при одновременной поддержке соответствующей его теплоты. Очень важным преимуществом этого материала является то, что это не обычное трикотажное изделие и не состоит из толстых волокон, поэтому переплетения ткани не оставляют следов на коже пациента и не вызывают повреждений в области сильного сжатия. ACTIV PREN имеет внутри свободную мембрану из микрофибры, которая впитывает пот, выводит его в область между ней и основным материалом, откуда через поры в неопреновой пенке пот испаряется. Такая структура материала дает гарантию, что на коже пациента остается лишь минимальное количество пота, что позволяет использовать наши ортезы в экстремальных условиях – например во время занятия спортом.

### СВОЙСТВА

1 Задержка должного количества тепла – для того, чтобы не доводить до чрезмерного охлаждения или перегревания организма.

2 Комфорт ношения - ортез не состоит из толстых волокон, поэтому переплетения не оставляют следов на коже и не вызывают повреждений в области сильного сжатия.

3 Удобство использования - ортез легко накладывается и снимается самим пациентом.

4. Конструкция ортеза предусматривает специфику строения тела и обеспечивает максимальный комфорт его использования, дает неограниченную свободу движения, как женщинам, так и мужчинам.

### ПОКАЗАНИЯ

Материал, из которого изготовлен ортез, соответственно сжимая мышцы, помогает циркуляции крови и положительно влияет на функционирование и снабжение кислородом всего организма. Ортез на руку и плечо ограничивает болезненный диапазон движения при перенапряжении сустава.

Применение: в качестве защиты в контактных видах спорта, существенно ограничивает активные движения; при болевых синдромах плечевого сустава; после перенапряжения плечевого сустава; после травм (повреждение конуса ротаторов, повреждение сумки плечевого сустава, хронические болевые ощущения в плечевом суставе) – в качестве утеплителя плеча.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

В случае свежих ран и повреждений кожного покрова применение ортеза возможно только сверху на бинтовую повязку. В случае появления кожных изменений аллергического характера в местах прилегания ортеза, следует обратиться к врачу.

Не следует использовать ортез после применения мази, крема или разогревающего геля. Отсутствие повседневной личной гигиены или неправильное хранение ортеза (нетщательная стирка и полоскание) могут вызвать повреждение кожного покрова или аллергические реакции, связанные с повышенной потливостью и появлением бактериальной флоры.

ВНИМАНИЕ: не использовать в случае переломов или вывихов, которые требуют более стабильной защиты, например, гипсовой повязки.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1 Ручная стирка в теплой мыльной воде при температуре до 30 градусов.

2 Не гладить.

3 Не обрабатывать хлором.

4. Сушить вдали от источников тепла.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед стиркой демонтировать алюминиевый вкладыш.

### СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556  
Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

© 2012

**REH4MAT**  
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński  
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.  
POLAND  
tel.: +48 (17) 851 66 30;  
tel./fax: +48 (17) 851 62 23  
e-mail: biuro@reh4mat.com  
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

### ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,  
fax +48 017 864-04-71;



5 9 0 1 2 8 9 1 1 3 0 1 1 0

