



AS-Ł-02

УСИЛЕННЫЙ ОРТЕЗ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Ортез локтя относится к группе ACTIV SPORT, он выполнен из современного сырья ACTIV PREN, характеризующегося мягкостью и высокой эластичностью, что решительно облегчает прилегание изделия к конечности и гарантирует соответствующую компрессию локтевого сустава. Это структурный материал, складывающийся из перфорированной неопреновой пены и полиамидовых трикотажей. Благодаря перфорации, охраняемый сустав дополнительно вентилируется, а также удерживается соответствующая температура. Отличительной чертой этого материала является его нетканая структура, он не имеет грубых волокон, и благодаря этому сплетения трикотажа не отрываются на коже пациента и не оставляют следов в месте большой компрессии.

ОСОБЕННОСТИ

1. Поддержание соответствующей температуры – во избежание переохлаждения или перегрева организма,
2. Комфорт ношения – ортез не имеет грубых волокон, благодаря чему сплетения не отпечатываются на коже и не оставляют следов в местах большой компрессии,
3. Лёгкость использования – простой способ одевания и снятия изделия пациентом.
4. Конструкция ортеза учитывает специфику телосложения и обеспечивает максимальный комфорт её использования, делает возможным неограниченную свободу движения как и женщинам как и мужчинам.
5. Изделие оснащено боковыми амортизаторами и окружающими затягивающимися лентами дополнительно стабилизирующими локтевой сустав, а также лентами VELCRO предохраняющими ортез перед неконтролируемым расстегиванием.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Материал из которого выполнен ортез соответственно стягивая мышцы способствует правильному кровообращению и положительно влияет на функционирование и снабжение кислородом целого организма. Ортез AS-Ł/A отлично стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки, обогрывает, смягчает боль, улучшает кровообращение и заслоняет локоть.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- После перенесенных травм локтевого сустава;
- * При острых и длительных болевых ощущениях в области группы мышц предплечья;
 - * При растяжениях (теннис, гольф, бадминтон) при назначении лечащего врача - делает возможным более быстрое возобновление тренировок;
 - * При выполнении тяжёлых физических нагрузок связанных с ротационными движениями предплечья и руки;
 - * При выполнении тяжёлых физических упражнений вызывающих значительные перегрузки локтевых суставов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Исключительно правильно заложенный и подогнанный ортез выполняет требуемую функцию. Неправильное применение может привести к усилению болезни, ухудшению функции руки, появлению опухолей, кожных изменений, воспалительных состояний сухожилий – инструктаж по заложению проводит лечащий врач или квалифицированный техник – реабилитации. Продолжительное применение ортеза локтевого сустава может привести к потере мышечной массы – необходимо выполнение систематических упражнений, рекомендованных лечащим врачом. В случае свежих ран и поврежденной эпидермиса применение возможно исключительно на перевязку, в случаях выступления опухолей, нарушений чувствительности необходимо ограничение время использования. Применение ортеза должно быть прервано, в случае выступления кожных изменений аллергического характера в месте прилегания ортеза, необходим контакт с врачом, не полагаться применять ортез после употребления мазей, кремов или разогревающего геля, несоблюдение ежедневной личной гигиены или неправильной консервации изделия (не тщательная стирка и споласкивание) могут вызвать натирание эпидермиса или возникновение аллергических реакций связанных с усиленной потливостью и развитием бактериальной флоры.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Стирать вручную в теплой воде с добавлением мыла в температуре 30 градусов
- Не гладить.
- Не использовать хлорсодержащих отбеливателей
- Сушить вдали от источников тепла.

ВНИМАНИЕ: Перед стиркой снять алюминиевый вкладыш.



Изделие медицинского назначения кл. 1

– удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556
Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

© 2011

REH4MAT
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

