



EB-Ł

ОРТЕЗ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА С ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КИТОВЫМИ УСАМИ PROFIT

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Ортез локтевого сустава выполненный с ProFit. Это двухслойная ткань, которая идеально сливается с телом пациента, она растягивает во всех направлениях отлично моделируя форму конечности, создает эффект «второй кожи». Внешний слой из спандэкса отвечает за соответствующую компрессию и подгонку изделия, сокращает мышечные колебания, возникающее во времени физического усилия. Внутренняя мембрана с микрофибры, хлопчатника и эластана отвечает за удержание соответствующего климата кожи и пропускание влаги. Ее структура гарантирует бархатную мягкость в прикосновении. Изделие оснащено эластичными боковыми китовыми усами отлично стабилизирующими локтевой сустав, затягивающиеся ленты VELCRO гарантируют идеальную фиксацию конечности, застежка-молния облегчает наложение изделия.

ОСОБЕННОСТИ

1. Стабилизирует локтевой сустав, разгружает мышцы предплечья и руки.
2. Смягчает болевые ощущения; благодаря удержанию оптимальной температуры и эластичному стягиванию; уменьшает опухоли; облегчает впитывание кровоподтеков после перенесенных травм.

3. Делает возможным более быстрое восстановление трудоспособности и возобновление тренировок. Показания к применению назначает лечащий врач.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- После перенесенных травм локтевого сустава,
- При острых и длительных болевых ощущениях групп мышц предплечья на фоне растяжения и воспаления;
- Профилактически в спорте и при тяжелых физических нагрузках, связанных с ротационными движениями предплечья и руки и вызывающих значительные перегрузки локтевых суставов. Исполняет защитную функцию в контактных видах спорта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Исключительно правильно заложенный и подогнанный ортез выполняет требуемую функцию - неправильное применение может привести к усилению болезни, ухудшению функции руки, появлению опухолей, кожных изменений, воспалительных состояний сухожилий - инструктаж по заложению проводит лечащий врач или квалифицированный техник реабилитации. Продолжительное применение ортеза локтевого сустава может привести к потере мышечной массы - необходимо выполнение систематических упражнений, рекомендуемых лечащим врачом.

- В случае выступления опухолей, нарушений чувствительности предплечья или руки, необходимое расстегнуть или снять ортез и проконсультироваться с врачом

- Кожа в месте прилегания ортеза должна быть чистой (не рекомендуется применение кремов, лечебных компрессов непосредственно перед заложением ортеза)

- Неправильная консервация изделия — не тщательная стирка и споласкивание может привести к возникновению кожных изменений связанных с усиленной потливостью под ортезом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Стирать вручную в теплой воде с добавлением мыла в температуре 30 градусов
- Не гладить.
- Не использовать хлорсодержащих отбеливателей
- Сушить вдали от источников тепла.

ВНИМАНИЕ: Перед стиркой снять алюминиевый вкладыш.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 - удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556
Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

☑ 2011

REH4MAT
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

