

RU



U-LK

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ОРТЕЗ СПИНЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Бандаж ортопедический U-LK относится к группе LUMBO SACRALIS, универсальное безразмерное изделие, выполненное из современного материала ACTIV PREN, характеризующегося мягкостью и высокой эластичностью, что решительно облегчает прилегание изделия к телу пациента и гарантирует соответствующую компрессию. Это структурно-составной материал, складывающийся из перфорированной неопреновой пены и полиамидных трикотажей. Благодаря перфорации, охраняемый сустав дополнительно вентилируется, а также удерживается соответствующая температура. Отличительной чертой этого материала является его нетканая структура, он не имеет грубых волокон, и благодаря этому сплетения трикотажа не отпечатываются на коже пациента и не оставляют следов в месте большой компрессии. ACTIV PREN имеет в середине свободную мембрану выполненную с микрофибры, которая впитывает влагу с тела пациента, пропускает ее в пространство между ней и основным материалом, а откуда порами в неопрене влага испаряется. Такая конструкция сырья гарантирует, что только минимальное количество пота находится на поверхности кожи, что позволяет на использование наших ортезов в экстремальных условиях - напр. во время активного спорта.

СВОЙСТВА

Конструкция ортеза учитывает специфику телосложения и обеспечивает максимальный комфорт использования, делает возможным неограниченную свободу движения как женщинам так и мужчинам. Стабилизирует поясничный отдел позвоночника благодаря поддержанию мышц живота; Он обогрывает.

ПОКАЗАНИЯ

- после перенесенных травм или перегрузок (слишком интенсивных тренировок или тяжелой физической нагрузки) мышц живота и спины

- при длительных болевых симптомах поясничного отдела позвоночника
- профилактически у людей начинающих интенсивную тренировку (особенно в первоначальном периоде) или выполняющих физическую нагрузку со слабыми мышцами живота
- может исполнять защитную функцию в контактных видах спортах

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- чувство удушья, дискомфорт, ограничение дыхательной способности, кислая или горькая отрыжка, печение в пищеводе, изжога, боли в области ребер могут не время значительно ограничить или даже прервать применение ортеза (после консультирования с врачом)
- у людей с нейроциркулярным недержанием мочи и в случае острых инфекций мочевой системы применение ортеза может усилить болезнь
- у людей с болезнями печени и желчного пузыря применение ортеза может быть плохо переносимо
- полагаться особенно контролировать правильность применения корсета в соответствии с рекомендациями у детей, людей с нарушениями памяти, больных психически
- в случае изменений на коже в месте прилегания (нарушение эпидермиса, ранения, кожные экземы) применение корсета ограничено - возможно после наложения перевязки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Исключительно правильно подобранный, подгнанный и примененный в соответствии с рекомендациями лечащего врача ортез исполняет заложенную функцию - инструктаж заложения предоставляет лечащий врач или подготовленный техник реабилитации. Ортез должна быть одет на хлопковое белье - это предотвращает возникновению повреждений эпидермиса, натираний. В начальном периоде использования, при высокой температуры окружающей среды и у людей с нарушениями чувствительности необходим частый контроль состояния кожи в месте прилегания ортеза. Продолжительное применение ортеза может привести в потере мышечной массы. Показано систематическое выполнение рекомендуемых упражнений, которые подбираются индивидуально для данного пациента врачом или техником реабилитации. Сильное затягивание мышечного корсета может сократить время использования корсета. При продолжительном применении следует ограничивать время применения до необходимого минимума в течении суток. Во время еды ортез полагаться снимать. Следует избегать заложения ортеза непосредственно после принятия пищи или большого количества жидкостей. Кожа в месте прилегания корсета должна быть чистой (не рекомендуется применять мази, кремов, лечебных компрессов непосредственно перед заложением).
Неправильная консервации изделия - не тщательная стирка и полоскание может привести к возникновению кожных изменений связанных с усиленной потливостью под ортезом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Стирать вручную в теплой воде с добавлением мыла в температуре 30 градусов

Не гладить.
Не использовать хлорсодержащих отбеливателей
Сушить вдали от источников тепла.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1
- удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556
Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

© 2012

REH4MAT
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;



Дата актуализации: UL-U-LK/01-2012