


KOD KATALOGOWY	AM-D-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-04
CODE	AM-D-04
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-04



- 1. PL:** Umieść kciuk w ortezie.  
**EN:** Put the thumb in a brace.

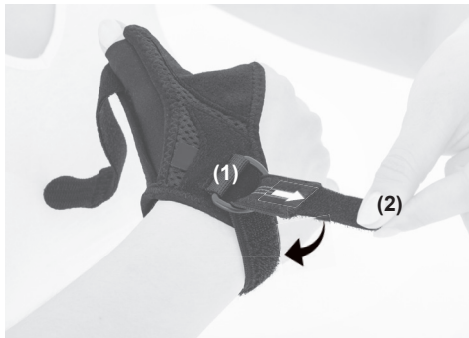

- 2. PL:** Przelóż pasek przez klamerkę (1) i zapnij rzep (2).  
**EN:** Interlace the strap through the buckle (1) and close the Velcro fastener (2).



- 3. PL:** Zapnij pasek obwodowy kciuka (3).  
**EN:** Fasten the circumferential strap of the thumb (3).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

