


KOD KATALOGOWY	AM-D-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-05
CODE	AM-D-05
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-05

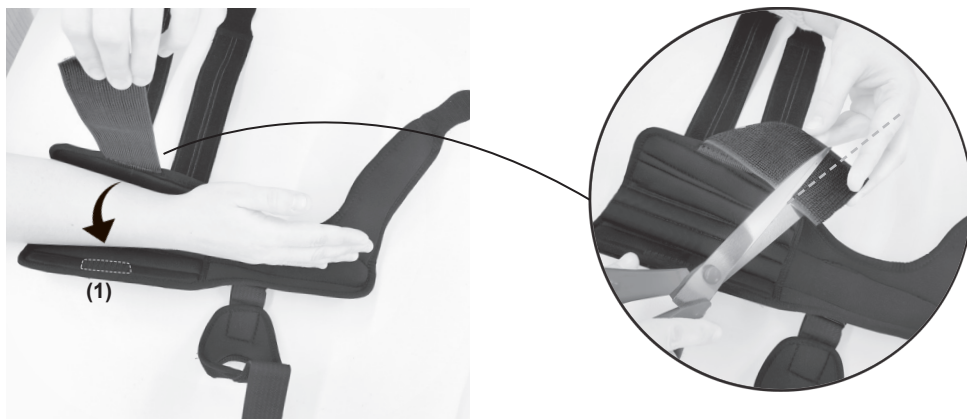

1. PL: Załóż ortezę na rękę i zapnij taśmę elastyczną na rzep (1). Jeśli jest potrzeba, odetnij jego zbędną długość.

EN: Put the brace on your hand and close the Velcro elastic band (1). If necessary, cut the needless part of the strap off.



2. PL: Przepleć taśmy obwodowe (2 i 3) przez klamry i zapnij je na rzep.

EN: Interlace the circumferential tapes (2 and 3) through the buckles and close them with Velcro.




3. PL: Załóż element stabilizujący na kciuk (4), przepleć taśmy przez klamerki (5) i (6), ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy.

EN: Put the thumb stabilizer on it (4), interlace the tapes through the buckles (5) and (6), set the appropriate compression and fasten with Velcro.



4. PL: Opleć pas stabilizujący (7) wokół palców i zapnij rzep.

EN: Wrap the stabilizing strap (7) around fingers and fasten with Velcro.

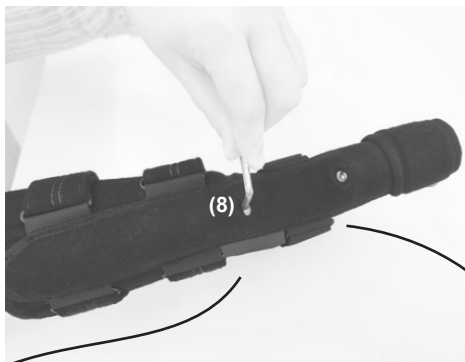

5. PL: Przy pomocy kluczyka imbusowego (8) dopasuj usztywnienie do ręki.

EN: Using the Allen key (8) adjust the brace to the hand.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.