


KĄT ZGIĘCIA LUB WYPROSTU USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB REHABILITANT

1. Ustawić ortezę w przybliżonym położeniu, w którym chcemy ograniczyć zgięcie (wyprost) rys.1.
2. Nacisnąć przycisk A i następnie obrócić element B tak aby pojawiło się odpowiednie miejsce oznaczone na szynie rys.1 - ODBLOKOWANIE.
3. Za pomocą magnesu C wsunąć stalowy nit D w odpowiednie miejsce kąta zgięcia lub wyprosty rys.2.
- E- Ograniczenie kąta wyprosty w np. 0°, rys.3
- F- Ograniczenie kąta zgięcia w np. 45°, rys.3
4. Po ustawieniu szyny należy obrócić element B tak aby przycisk A wrócił do pozycji początkowej rys.1 - ZABLOKOWANIE.

UWAGA:

Jeżeli ortezę wyposażoną jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach bocznych, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprosty (punkt 1-2). Szyny nie wymagają konserwacji

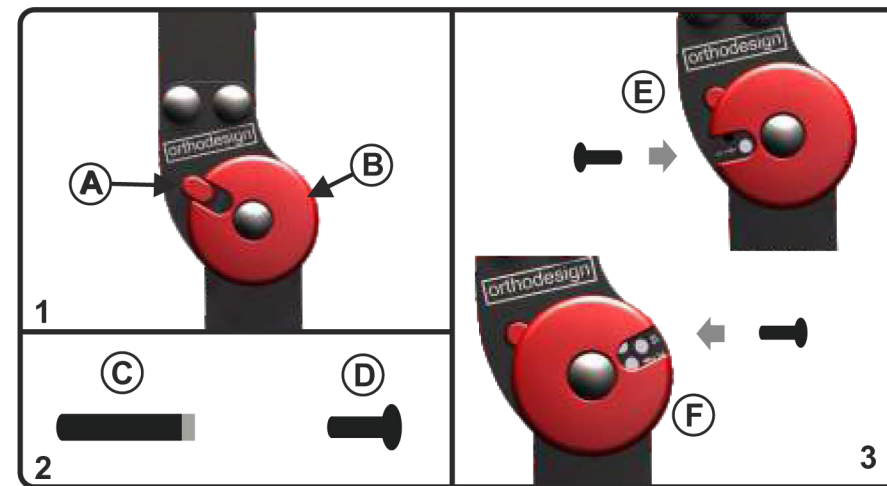

THE ANGLE OF FLEXION AND EXTENSION IS SPECIFIED BY THE DOCTOR OR PHYSIOTHERAPIST

1. Place the brace in the position in which you want to adjust the flexion/extension.
2. Push on button A and rotate element B to see holes of angles.
3. Use magnet C to place pins D in the holes of required flexion or extension.
- E- restriction of the extension angle at e.g. 0 degrees (3)
- F- restriction of the flexion angle at e.g. 45 degrees (3)
4. After adjustments rotate element B to enter position (button A - off) to lock it.

ATTENTION:

If the brace is equipped with 2 side splints, adjustment is done on each side splint separately, setting the same range of motion on both splints

Side splints do not require maintenance.