


KĄT ZGIĘCIA LUB WYPROSTU USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB REHABILITANT

Niniejsza orteza została wyposażona w szyny boczne z możliwością ograniczenia kąta zgięcia w 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, ograniczeniem kąta wyprost w 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15°, 0°, oraz przeprostu w -15°, -30°.

1. Ustawić ortezę w przybliżonym położeniu w którym chcemy ograniczyć zgięcie lub wyprost.
2. Przynajmniej jedną ogranicznik do środka przegubu przemieścić je po obwodzie w pożądanym miejscu z opisanym kątem.
3. Zablokować ograniczniki specjalnymi blokadami dołączonymi z szyną.

UWAGA:

Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach, utwierdzając ten sam kąt zgięcia lub wyprost. Szyny boczne nie wymagają konserwacji

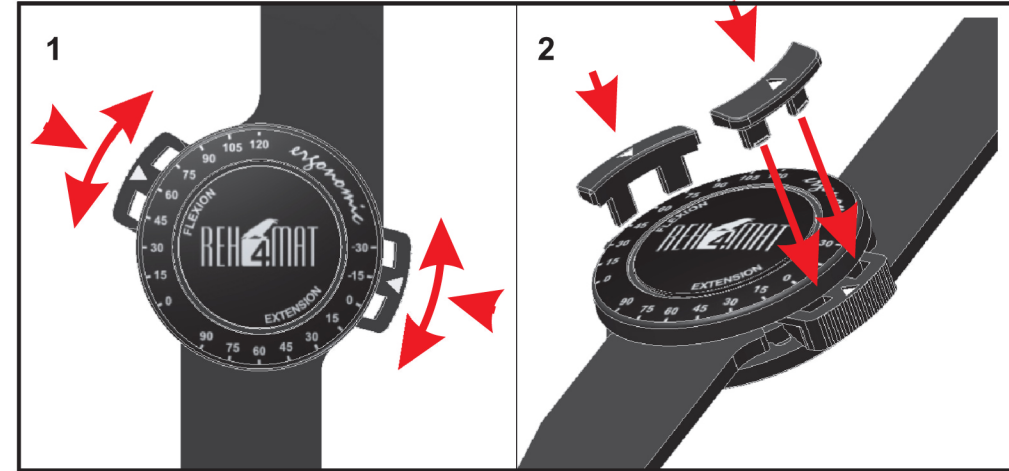

THE ANGLE OF FLEXION AND EXTENSION IS SPECIFIED BY THE DOCTOR OR PHYSIOTHERAPIST

The brace is equipped with two splints with ROM adjustment:

FLEXION: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° and EXTENSION: 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°.

There is also hyperextension control in: -15° and -30°.

1. Place the brace in the position in which you want to adjust the flexion/extension.
2. By pressing the buttons - delimiters (1) to the center of the splint move them around to the desired place with the prescribed angle.
3. Lock buttons with the special lockers (2) included in this kit.

ATTENTION:

If the brace is equipped with 2 slide splints, adjustment is done on each side splint separately, setting the same angle of flexion and extension. Side splints do not require maintenance.