



POLSKI

ENGLISH

POKROWIEC NIEPRZEMAKALNY

UWAGA: PRZED UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ ULOTKI ORAZ SPRAWDZIĆ CZY NA WYROBIE NIE POJAWIŁY SIĘ PRZETARCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I SZWÓW. TYLKO NIEUSZKODZONY WYRÓB GWARANTUJE JEGO WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE.
PONIŻSZE INFORMACJE O PRODUKCIE NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE MÓC PONOWNIE KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI.

OPIS PRODUKTU:

Pokrowiec nieprzemakalny służy do zabezpieczenia materaca przed jego zamoczeniem. Produkt można stosować zamiast prześcieradła, jak i pod właściwe prześcieradło jako dodatkowa ochrona. Produkt jest przeznaczony dla osób z problemami nietrzymania moczu.

WAŻNE:

- W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub uczulenia należy skontaktować się z lekarzem.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

- Prać w temp. 60 C,
- Dokładnie wyplukać,
- Nie prasować,
- Nie chlorować,
- Nie prać chemicznie,
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury,
- Suszyć z daleka od źródła ciepła,
- Nie wirować.

WATERPROOF SHEET

ATTENTION: BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTION COMPLETELY AND CAREFULLY AND CHECK IF PRODUCT'S ELEMENTS AND SEAMS ARE SEEDY. ONLY UNDAMAGED PRODUCT IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF IT.
SAVE THE PRODUCT INFORMATION, TO BE ABLE TO REREAD THE INSTRUCTION LATER.

PRODUCT DESCRIPTION:

The waterproof sheet is intended to protect mattress from getting wet. The product could be used instead of the normal bed cover and as a additional protection under the bed cover. The product is intended for people with urinary incontinence.

IMPORTANT:


- In case of skin lesions occurring and allergic reaction is it necessary to contact with physician.

CARE AND MAINTENANCE:

- Wash in temp. 60 C,
- Sluice carefully,
- Do not iron,
- Do not chlorinate,
- Do not dry clean,
- Protect from moisture,
- Protect from high temperatures,
- Dry away from sources of warmth,
- Do not swirl.

INSTRUCTION: 22.02.2016
DATA AKTUALIZACJI / THE UPDATE DATE OF THE
quality management system certificate
The company holds the ISO 13485 International
zgody z ISO 13485
Producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością
www.reh4mat.com,
e-mail: biuro@reh4mat.com

Mail: biuro@reh4mat.com
Address: ul. Tuskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND
tel.: +48 (016) 621 41 35, fax: +48 (016) 621 42 13
tel.: +48 (016) 621 42 20

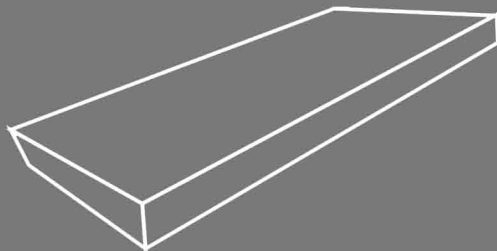

UWAGA: PRODUKT POWINIEN BYĆ STOSOWANY TYLKO PRZEZ JEDNEGO PACJENTA. STOSOWANIE WYROBU NIEZGODNIE Z ZASADAMI INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MOŻE GROZIĆ POWAŻNYMI POWIKŁANAMI.

ATTENTION: PRODUCT SHOULD BE USED ONLY BY ONE PATIENT . USING OF THE DEVICE NOT ACCORDING TO THE MANUAL MAY CAUSE SERIOUS COMPLICATIONS.