

KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-06
CODE	AM-OSN-U-06
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-06




- 1. PL:** Wypłść paski z klamerek i rozłóż ortezę.
EN: Remove the straps from the buckles and unfold the brace.




- 2. PL:** W razie potrzeby wyjmij z kieszonki poduszkę odciażającą cięśń nadgarstka.
EN: If needed, remove the carpal tunnel pad.



- 3. PL:** Załóż ortezę na rękę.
EN: Put on the brace on the wrist.

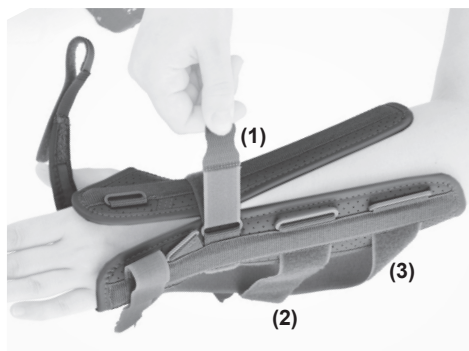


- 4. PL:** Przepleć paski przez klamerki i zapnij na rzepy według podanej kolejności.
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten with Velcros according to the following steps.

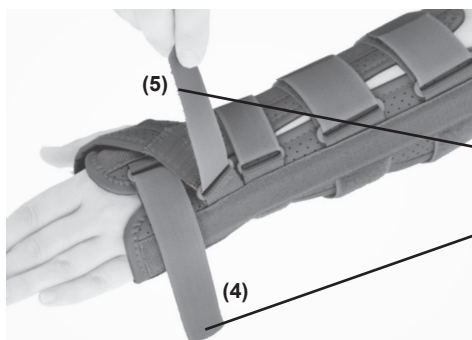

5. PL: Zapnij rzep (5).

EN: Fasten with Velcro (4).

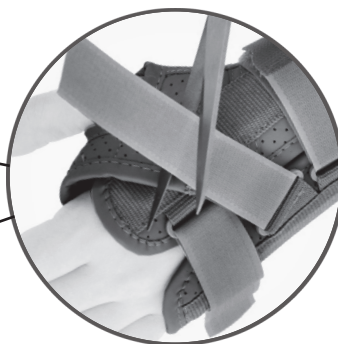

6. PL: Odetnij zbędną długość pasków.

EN: Cut the needless part of straps off.



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.