


KOD KATALOGOWY	OKD-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-04
CODE	OKD-04
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-04



**1. PL:** Rozepnij paski i przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółorzepkowym (1), a zegar znajdował się w osi stawu kolanowego.

**EN:** Unbuckle the straps, put the brace on your leg so that the kneecap is in the patellar donut and the drop lock is in the axis of the knee joint. Then close the Velcro (1).

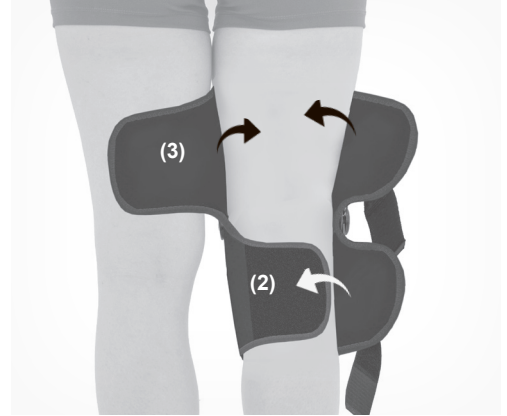

**2. PL:** Zapnij ortezę z tyłu na rzepy w podanej kolejności (2,3).

**EN:** Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (2,3).

**3. PL:** Przepleć taśmy przez klamerki i zapnij w podanej kolejności (4,5,6,7).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (4,5,6,7).





**4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.