
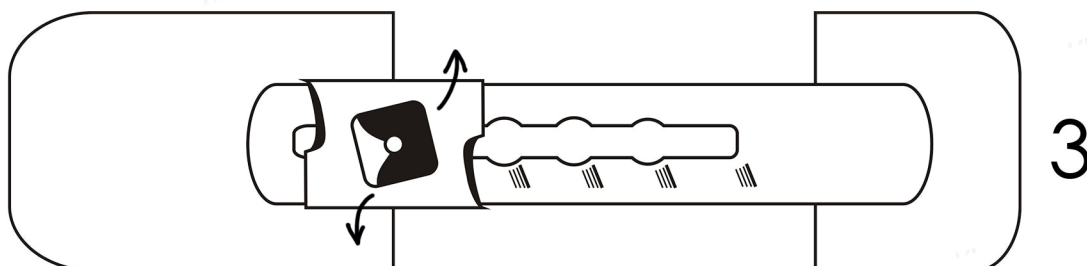
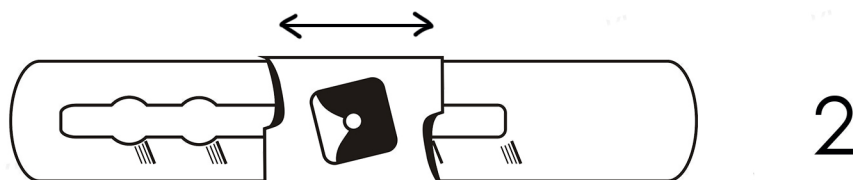


# INSTRUKCJA MECHANIZMU PRESS-SLIDE

*pre~~ss~~slide*

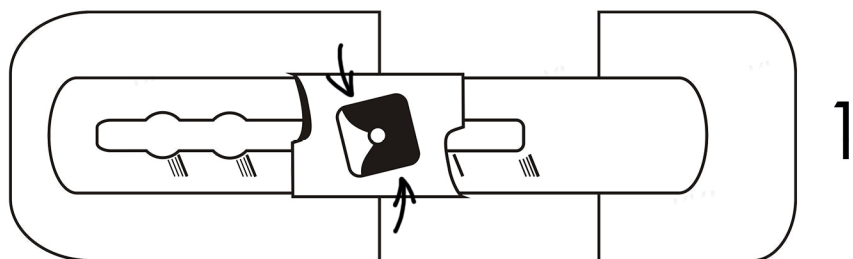

MECHANIZM PRESS-SLIDE pozwala na ustawienie odpowiedniej długości ortezy.




1. Wciśnij czarny przycisk umieszczony w mechanizmie.
2. Przesuń szynę do odpowiedniej długości. UWAGA! Specjalna skala ułatwia ustawienie tej samej długości obu szyn.
3. Poluzuj przycisk.

UWAGA! Przed przystąpieniem do ubioru ortezy na kończynę, sprawdź, czy mechanizm jest prawidłowo "zamknięty".

REH4MAT Sławomir Wroński  
Fabryka Wyrobów Ortopedycznych:  
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500  
Jarosław  
tel. 16 621 42 20, 16 621 41 35  
fax 16 621 42 13  
[www.reh4mat.com](http://www.reh4mat.com) | [www.ortezy.pl](http://www.ortezy.pl)  
e-mail: [biuro@reh4mat.com](mailto:biuro@reh4mat.com)

# INSTRUCTION OF THE PRESS-SLIDE SYSTEM

*pre***ssslide**

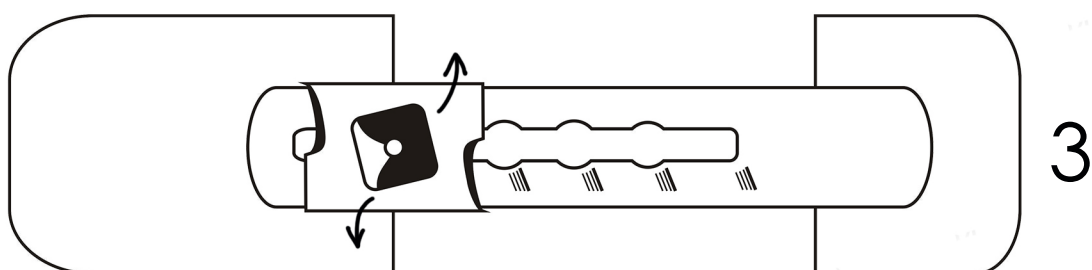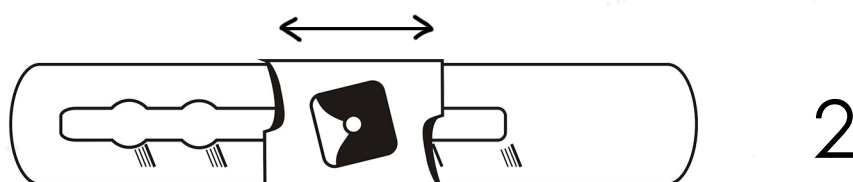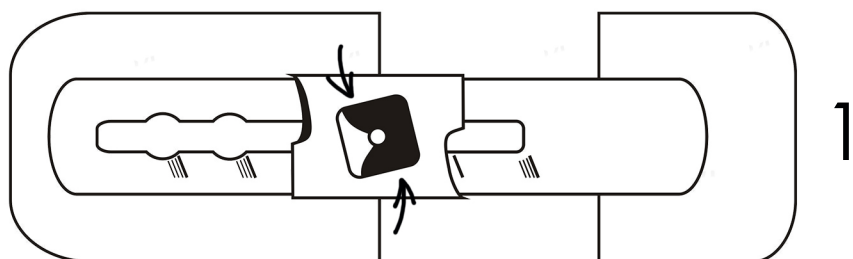

PRESS-SLIDE SYSTEM allows to adjust the required brace length in this case:

1. Press black button located on the splint.
2. Slide the splint to required length. ATTENTION! Special scale on the splint allows to adjust the length of two splints easy.
3. Depress button

ATTENTION! Before the putting the brace on, please check carefully if the PRESS-SLIDE SYSTEM is correctly "clicked".

REH4MAT Sławomir Wroński  
Fabryka Wyrobów Ortopedycznych:  
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500  
Jarosław  
tel. 16 621 42 20, 16 621 41 35  
fax 16 621 42 13  
[www.reh4mat.com](http://www.reh4mat.com) | [www.ortezy.pl](http://www.ortezy.pl)  
e-mail: [biuro@reh4mat.com](mailto:biuro@reh4mat.com)