



**THERMAL[®]
BRACES**

**HOT/COLD
BRACES**

P R O F E S J O N A L N E THERMALBRACES.COM

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA
LUB ETYKIETĄ.**

PROFESJONALNE ORTEZY TERMICZNE CIEPŁA/ZIMNA TERAPIA

DLACZEGO CIEPŁOLECZNICTWO?

Ciepłolecznictwo jest formą termoterapii, która polega na przekazywaniu energii przechodzącej z ciała o wyższej temperaturze do ciała chłodniejszego. Zabiegi z zastosowaniem wysokiej temperatury są powszechnie stosowane, nie tylko w przypadku urazów tkanek, ale również w schorzeniach podłoża reumatologicznego czy neurologicznego. Przewlekły ból stawowy, artretyzm, przykurcze czy zaburzenia czucia – to tylko kilka z wielu dolegliwości, których leczenie bazuje na zastosowaniu ciepłego okładu.


DLACZEGO KRIOTERAPIA?

Lód jest jednym z najbardziej powszechnie stosowanych zabiegów mających zastosowanie w następstwie wszelkiego rodzaju urazów. Praktycznie każdy, kto uprawia jakąś dyscyplinę sportu, słyszał angielski termin RICE. Wiemy, że litera „I” oznacza Icing, czyli chłodzenie, które jest koniecznością zarówno w przypadku natychmiastowej pomocy po urazie, jak i w procesie rehabilitacji. Lód jest naturalną częścią procesu leczenia i rekonwalescencji. Natychmiastowa aplikacja lodu po urazie wspiera ukrwienie tkanek oraz redukuje ból i opuchliznę po urazie.

JAK ONE DZIAŁAJĄ?


Celem ortez z serii Thermal Braces® jest wsparcie tkanek w procesie leczenia poprzez redukcję stanu zapalnego i opuchlizny natychmiast po urazie. Orteza składa się z dwóch części:

1 INNOWACYJNA ORTEZA WYKONANA ZOSTAŁA Z MATERIAŁU UniPren™

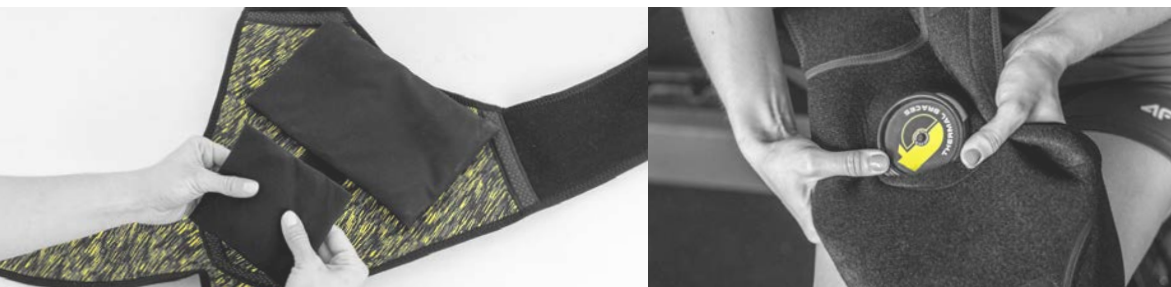


Ortezy są dostępne w rozmiarze uniwersalnym, dzięki czemu doskonale pasują na każdą sylwetkę. Zapewniają doskonałą kompresję i wspierają proces leczenia dzięki utrzymaniu stałej temperatury.

2 KOMPRES ŻELOWY LUB WOREK Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJĄCYM

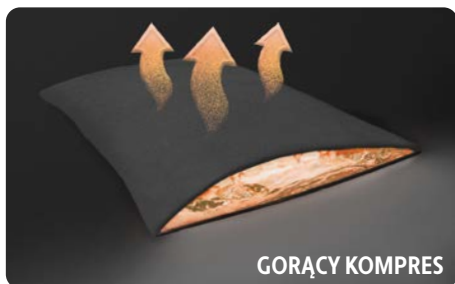

GORĄCY KOMPRES

OKŁAD Z GORĄCYM ŻELEM – może się szybko nagrzewać, już po kilku sekundach w gorącej wodzie lub kuchence mikrofalowej. Jest to produkt wielokrotnego użytku i bardzo wytrzymały.

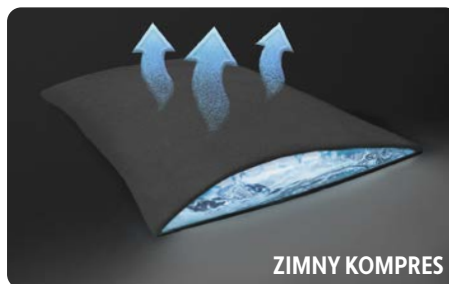

ZIMNY KOMPRES

OKŁAD Z ZIMNYM ŻELEM – trzymaj zimny okład w zamrażarce do natychmiastowego użycia, gdy potrzebujesz okładu z lodu i ciesz się korzyściami terapii zimnem!



GORĄCA WODA

UWAGA! - w przypadku przewlekłego stanu zapalnego zaleca się stosowanie worka w ramach terapii ciepłem. Aby to zrobić, napełnij worek gorącą wodą i nałóż na bolesny obszar. Stała temperatura ciepła zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie oraz ogranicza skurcze.




KRUSZONY LÓD

WOREK Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJĄCYM – wypełnij worek kruszonym lodem i przyłóż do kontuzjowanego obszaru. Załóż ortezę. Naciśnij zawór i usuń powietrze z worka zapewniając sobie doskonałe przyleganie lodu do ciała.

● INDEKS

DLACZEGO CIEPŁOLECZNICTWO? - KRIOTERAPIA?	2,3		
TERMALNA ORTEZA KRĘGOSŁUPA	4,5	TB-01	TB-21
TERMALNA ORTEZA BARKU	6,7	TB-02	TB-22
TERMALNA ROZBUDOWANA ORTEZA BARKU	8,9	TB-03	TB-23
TERMALNA ORTEZA KOLANA	10,11	TB-04	TB-24
TERMALNA UNIWERSALNA ORTEZA	12,13	TB-05	TB-25
TERMALNA ORTEZA KRĘGOSŁUPA, BIODRA I PLECÓW	14,15	TB-06	TB-26
TERMALNA ORTEZA PLECÓW	16,17	TB-07	TB-27
TERMALNA ORTEZA KOLANA	18,19		TB-28
TERMALNA ORTEZA BIODRA	20,21		TB-29
UNIPREN	21		
SPORTOWCY	22		

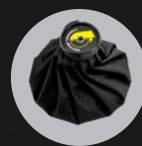

Worek z
zaworem



Okład
żelowy

strona

TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM ORTEZA KRĘGOSUPA

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

/chroniczny ból mięśniowo-szkieletowego np. lumbago
(z wyłączeniem ostrych stanów zapalnych),
/napięcia mięśni, skurcze, ból pleców, ból miesiączkowy,
/reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
/uczucie zimna (jako termoфор).

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

/zespoły bólowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
/zwyrodnienie kręgosłupa,
/dyskopatia,
/przeciążenia mięśniowe dolnej partii pleców,
/skręcenie mięśni.



LSO

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

THERMALBRACES.COM

TERMALNA ORTEZA KRĘGOSŁUPA



TB-01

Niską terapeutyczną temperaturę zapewnia kruszony lód, umieszczony w specjalnym worku. Orteza zapewnia skuteczną terapię zimnem, niwelując dolegliwości bólowe i zmniejszając stan zapalny.

Orteza jest wyposażona w specjalistyczny zawór odprowadzający powietrze i zapewniający doskonałe przyleganie produktu do dolnej partii pleców, otulając je niską temperaturą i tworząc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”.

UWAGA! W przypadku przewlekłego stanu zapalnego zaleca się stosowanie worka w ramach terapii ciepłem. Aby to zrobić, napełnij worek gorącą wodą i nałóż na bolesny obszar. Stała temperatura ciepła zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie oraz ogranicza skurcze.

- CIEPŁY/ZIMNY WOREK
- Z ZAWOREM ODPOWIEDZAJĄCYM



TB-21

Wyposażona jest w specjalistyczny okład żelowy, zapewnia efekt krioterapii i ciepłolecznictwa. okład żelowy może być stosowany dwójako:

- umieszczony w zamrażalce lub lodówce zapewnia krioterapeutyczny efekt leczenia zimnem, doskonały w przypadku nagłych urazów mięśni i stawów.
- umieszczony w mikrofalówce zapewnia efekt leczenia ciepłem, skuteczny w przypadku przewlekłego bólu reumatycznego i neurologicznego.

- CIEPŁY/ZIMNY KOMPRES ŻELOWY



INNOWACYJNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



2 W 1



WOLNY OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW

TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM ORTEZA **BARKU**

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

- /chroniczny ból mięśniowy barku,
- /napięcia mięśni, skurcze,
- /reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
- /zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowego.

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

- /stan zapalny stawu barkowego,
- /przeciążenie stożka rotatorów,
- /po przebytych uszkodzeniach stawu barkowego,
- /nawykowe zwichnięcie stawu ramennego,
- /niestabilność barku, ból, obrzęk,
- /uszkodzenie obrąbka panewkowego typu SLAP,
- /zespół ciasnoty barkowej/zespół bolesnego braku,
- /bark zamrożony, artroza,
- /po zabiegach operacyjnych (artroskopia barku).




ORTEZA BARKU

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

THERMALBRACES.COM

TERMALNA ORTEZA BARKU

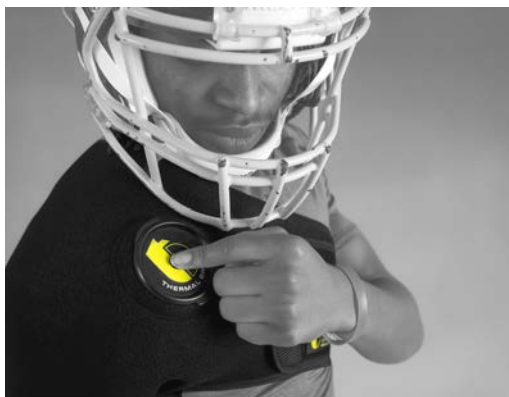

TB-02

Nasza orteza barku to dwuczęściowe termalne rozwiązanie, gwarantujące natychmiastowe uśmierzanie bólu. Neoprenowa opaska oraz worek na kruszony lód zapewniają stałą kompresję i krioterapię przecięzionych tkanek miękkich stawu barkowego. Na wieczku worka na kruszony lód umieściliśmy specjalistyczny zawór odpowietrzający, który zapewnia doskonałe przyleganie woreczka do okolic barku, otulając je niską temperaturą i tworząc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”.

UWAGA! W przypadku przewlekłego stanu zapalnego zaleca się stosowanie worka w ramach terapii ciepłem. Aby to zrobić, napętnij worek gorącą wodą i nałóż na bolesny obszar. Stała temperatura ciepła zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie oraz ogranicza skurcze.

- CIEPŁY/ZIMNY WOREK
- Z ZAWOREM ODPOWIEZRZAJĄCYM




TB-22

Termalna orteza barku TB-22 wyposażona w specjalistyczny okład żelowy zapewnia efekt krioterapii i ciepłolecznictwa. Orteza niweluje dolegliwości bólowe barku w przypadku stłuczenia lub zmian zwyrodnieniowych. Okład żelowy może być stosowany dwójako:

- umieszczony w zamrażalce lub lodówce zapewnia krioterapeutyczny efekt leczenia zimnem, doskonały w przypadku nagłych urazów mięśni i stawów.
- umieszczony w mikrofalówce zapewnia efekt leczenia ciepłem, skuteczny w przypadku przewlekłego bólu reumatycznego i neurologicznego.

- CIEPŁY/ZIMNY KOMPRES ŻELOWY

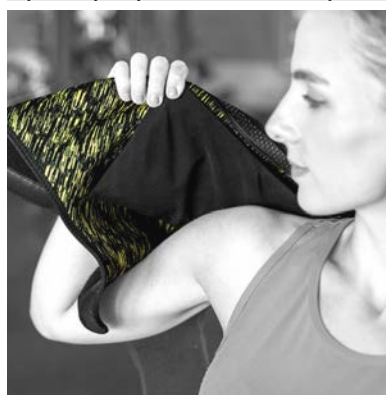


INNOWACYJNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR UNIWERSALNY

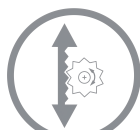

SZEROKI ZAKRES REGULACJI



2 W 1



WOLNY OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW

TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM ROZBUDOWANA ORTEZA BARKU

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

/chroniczny ból mięśniowy barku,
/napięcia mięśni, skurcze,
/reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
/zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowego.

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

/stan zapalny stawu barkowego,
/przeciążenie stożka rotatorów,
/po przebytych uszkodzeniach stawu barkowego,
/nawykowe zwichnięcie stawu ramiennego,
/niestabilność barku, ból, obrzęk,
/uszkodzenie obrąbka panewkowego typu SLAP,
/zespół ciasnoty barkowej/zespół bolesnego braku,
/bark zamrożony, artroza,
/po zabiegach operacyjnych (artroskopia barku).




ORTEZA BARKU

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

ROZBUDOWANA TERMALNA ORTEZA BARKU

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykieta.

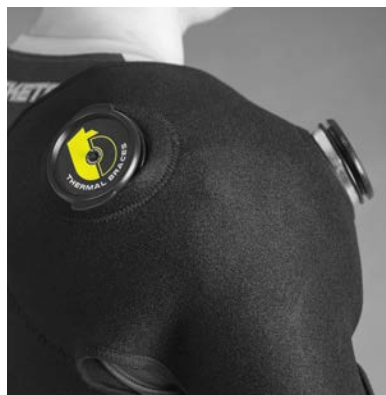


TB-03

Nasza orteza barku to trzyczęściowe termalne rozwiązanie, gwarantujące natychmiastowe uśmierzanie bólu. Rozbudowana część barkowa, wykonana z neoprenu zapewnia stałą kompresję stawu. 2 otwory umożliwiają zastosowanie 2 worków z kruszonym lodem, chłodzących przednią i tylną część stawu barkowego. Na wieczkach worków na lód umieściliśmy specjalistyczny zawór odpowietrzający, który zapewnia doskonałe przyleganie woreczka do okolic barku, otulając je niską temperaturą i tworząc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”.

UWAGA! W przypadku przewlekłego stanu zapalnego zaleca się stosowanie worka w ramach terapii ciepłem. Aby to zrobić, napełnij worek gorącą wodą i nałóż na bolesny obszar. Stała temperatura ciepła zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie oraz ogranicza skurcze.

- CIEPŁY/ZIMNY WOREK
- Z ZAWOREM ODPOWIERZAJĄCYM

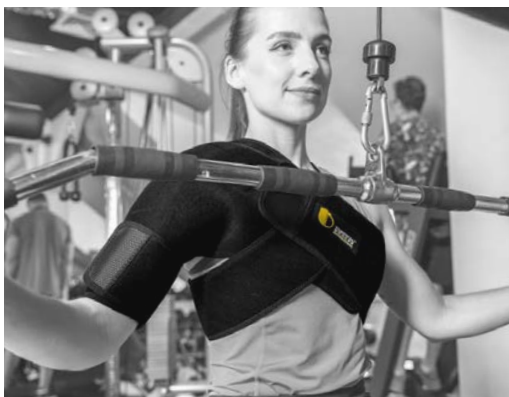


TB-23

Termalna orteza barku TB-23, wyposażona w specjalistyczny okład żelowy, zapewnia efekt krioterapii i ciepłolecznictwa. Orteza niweluje dolegliwości bólowe barku w przypadku stłuczenia lub zmian zwyrodnieniowych. Okład żelowy może być stosowany dwojako:

- umieszczony w zamrażalce lub lodówce zapewnia krioterapeutyczny efekt leczenia zimnem, doskonały w przypadku nagłych urazów mięśni i stawów.
- umieszczony w mikrofalówce zapewnia efekt leczenia ciepłem, skuteczny w przypadku przewlekłego bólu reumatycznego i neurologicznego.

- CIEPŁY/ZIMNY KOMPRES ŻELOWY
-

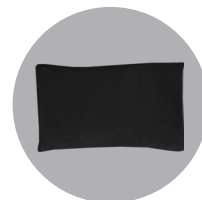

INNOWACYJNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



2 W 1



WOLNY OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW

TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM ORTEZA **KOLANA**

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

/chroniczny ból mięśniowy kolana,
/napięcia mięśni, skurcze,
/reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
/zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego.

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

/skręcenie kolana, zwichnięcie kolana,
/uszkodzenie więzadeł (ACL, PCL, MCL, LCL),
/kolano skoczka, kolano kinomaniaka,
/boczne przyparcie rzepki, zwichnięcie rzepki,
/uszkodzenie łąkotek, chondromalacja rzepki,
/kolano biegacza,
/niestabilność stawu kolanowego osteoartroza (OA),
/po zabiegach operacyjnych (artroskopia kolana).



**NIE NAKŁADAĆ NA SKÓRĘ
JEŚLI PRODUKT JEST
GORĄCY!**



ORTEZA KOLANA

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

THERMALBRACES.COM

T H R M A L N A ORTEZA KOLANA



TB-04

Łód kruszony, umieszczony w specjalnym worku zapewnia skuteczną terapię zimnem, niwelując dolegliwości bólowe i zmniejszając stan zapalny. Otwarta neoprenowa konstrukcja ortezy oraz nasz autorski zawór odprowadzający powietrze zapewniają doskonałe przyleganie worka z lodem do stawu kolanowego, otulając go niską temperaturą i tworząc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”.

UWAGA! W przypadku przewlekłego stanu zapalnego zaleca się stosowanie worka w ramach terapii ciepłem. Aby to zrobić, napełnij worek gorącą wodą i nałóż na bolesny obszar. Stała temperatura ciepła zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie oraz ogranicza skurcze.



- CIEPŁY/ZIMNY WOREK
- Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJĄCYM




TB-24

Termalna orteza kolana TB-24, wyposażona w specjalistyczny okład żelowy, zapewnia efekt krioterapii i ciepłolecznictwa. Orteza niweluje dolegliwości bólowe kolana w przypadku stłuczenia lub zmian zwyrodnieniowych. Kompres żelowy może być stosowany dwojako:

- umieszczony w zamrażalce lub lodówce zapewnia krioterapeutyczny efekt leczenia zimnem, doskonały w przypadku nagłych urazów mięśni i stawów.
- umieszczony w mikrofalówce zapewnia efekt leczenia ciepłem, skuteczny w przypadku przewlekłego bólu reumatycznego i neurologicznego.



- CIEPŁY/ZIMNY KOMPRES ŻELOWY

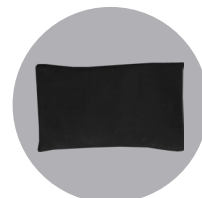

INNOWACYJNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



2 W 1



WOLNY OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW

TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM UNIVERSAL BRACE

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

/chroniczny ból mięśniowy stawu skokowego, łokcia,
podudzia czy przedramienia,
/napięcia mięśni, skurcze,
/reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
/zmiany zwyrodnieniowe stawów.

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

/skręcenie/zwichnięcie stawu skokowego,
/nawykowe zwichnięcie stawu skokowego,
/zespół bólowy stawu skokowego i aparatu więzadłowego,
/łokiec tenisisty, łokiec golfisty,
/skręcenie/przeciążenie stawu łokciowego,
/skręcenie/przeciążenie nadgarstka, stan zapalny mięśni łydki,
/przeciążenie i naderwanie mięśni łydki,
/„noga tenisisty”,
/napięcie przyśrodkowej strony piszczeli (SHIN SPLINT),
/przewlekła niestabilność i stany zapalne stawów.



ORTEZA ŁOKCIA



ORTEZA PODUDZIA



ORTEZA
STAWU SKOKOWEGO



ORTEZA NADGARSTKA
I PRZEDRAMIENIA

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

TERMALNA ORTEZA UNIWERSALNA



TB-05

To innowacyjne rozwiązanie gwarantujące skuteczną krioterapię połączoną z kompresją. Terapeutyczną niską temperaturę zapewnia kruszony lód. Otwarta neoprenowa konstrukcja ortezy oraz nasz autorski zawór odprowadzający powietrze zapewniają doskonałe przyleganie worka z lodem do różnych części ciała, otulając je niską temperaturą i tworząc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”. Ze względu na swój uniwersalny kształt orteza TB-05 doskonale chłodzi staw łokciowy, przedramię, kostkę i podudzie.

UWAGA! W przypadku przewlekłego stanu zapalnego zaleca się stosowanie worka w ramach terapii ciepłem. Aby to zrobić, napełnij worek gorącą wodą i nałóż na bolesny obszar. Stała temperatura ciepła zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie oraz ogranicza skurcze.

- CIEPŁY/ZIMNY WOREK
- Z ZAWOREM ODPOWIETRAJĄCYM



TB-25

Termalna orteza kolana TB-25, wyposażona w specjalistyczny okład żelowy, zapewnia efekt krioterapii i ciepłolecznictwa. Ze względu na swój uniwersalny kształt orteza doskonale chłodzi lub rozgrzewa staw łokciowy, przedramię, kostkę i podudzie. Orteza niweluje dolegliwości bólowe w przypadku stłuczenia lub innych zmian zwyrodnieniowych. Kompres żelowy może być stosowany dwójako:

- umieszczony w zamrażalce lub lodówce zapewnia krioterapeutyczny efekt leczenia zimnem, doskonały w przypadku nagłych urazów mięśni i stawów.
- umieszczony w mikrofalówce zapewnia efekt leczenia ciepłem, skuteczny w przypadku przewlekłego bólu reumatycznego i neurologicznego.

- CIEPŁY/ZIMNY KOMPRES ŻELOWY



INNOWACYJNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



2 W 1



WOLNY OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW



TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM ORTEZA **KRĘGOSŁUPA, BIODRA I PLECÓW**

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

/chroniczny ból mięśniowy stawu biodrowego i pleców,
/napięcia mięśni, skurcze,
/reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
/zmiany zwyrodnieniowe stawów, bóle menstruacyjne.

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

/artroza/niestabilność stawu krzyżowo-biodrowego,
/bóle mięśni i tendopatie w obszarze miednicy,
/zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego (coxartroza),
/stan zapalny mięśni i tkanek miękkich w obrębie biodra,
/przeciążenie stawu biodrowego,
/ostre zespoły bólowe/dyskopatia w odcinku
łędźwiowo-krzyżowym,
/przeciążenia odcinka łędźwiowo-krzyżowego,
/skręcenia/przeciążenia mięśni grzbietu.



ORTEZA BIODRA



ORTEZA MIEDNICY



SO



LSO



TLSO

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

TERMALNA

ORTEZA KRĘGOSŁUPA, BIODRA I PLECÓW



TB-06

Łód kruszony, umieszczony w specjalnym worku zapewnia skuteczną terapię zimnem, niwelując dolegliwości bólowe i zmniejszając stan zapalny. Otwarta neoprenowa konstrukcja ortezy, specjalna kieszonka oraz nasz autorski zawór odprowadzający powietrze zapewniają doskonałe przyleganie worka z lodem do stawów biodrowych, lędźwiowo-krzyżowych lub pleców, otulając je niską temperaturą i tworząc tym samym natychmiastowy „zimny opatrunek”.

UWAGA! W przypadku przewlekłego stanu zapalnego zaleca się stosowanie worka w ramach terapii ciepłem. Aby to zrobić, napełnij worek gorącą wodą i nałóż na bolesny obszar. Stała temperatura ciepła zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie oraz ogranicza skurcze.

- CIEPŁY/ZIMNY WOREK
- Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJĄCYM



TB-26

Termalna orteza kręgosłupa, biodra i pleców wyposażona w specjalistyczny okład żelowy, zapewnia efekt krioterapii i ciepłolecznictwa. Orteza doskonale chłodzi lub rozgrzewa stawy biodrowe, lędźwiowo-krzyżowe oraz wybraną część kręgosłupa. Orteza niweluje dolegliwości bólowe w przypadku stłuczenia lub zmian zwyrodnieniowych. Kompres żelowy może być stosowany dwojako:

- umieszczony w zamrażalce lub lodówce zapewnia krioterapeutyczny efekt leczenia zimnem, doskonały w przypadku nagłych urazów mięśni i stawów.
- umieszczony w mikrofalówce zapewnia efekt leczenia ciepłem, skuteczny w przypadku przewlekłego bólu reumatycznego i neurologicznego.

- CIEPŁY/ZIMNY KOMPRES ŻELOWY



INNOWACYJNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



2 W 1



WOLNY OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW

TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM ORTEZA PLECÓW

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

/chroniczny ból mięśniowy górnej partii pleców,
/napięcia mięśni, skurcze,
/reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
/zmiany zwyrodnieniowe stawów.

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

/skręcenie/naderwanie ścięgien mięśnia czworobocznego,
/przeciążenie mięśni górnej partii pleców,
/bolesność mięśni karku.



ORTEZA PLECÓW

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

THERMALBRACES.COM

TERMALNA ORTEZA PLECÓW



TB-07

Produkt składa się z neoprenowej opaski oraz 2 worków na lód kruszony. Opaska, wyposażona w 4 otwory na worki, otacza górną partię pleców, zapewniając im tym samym stałą kompresję. 2 worki na lód można wykorzystać dwojako:

- dla górnej części mięśnia prostownika grzbietu i mięśni karku,
- jako skuteczna krioterapia prawego i lewego mięśnia czworobocznego grzbietu.

UWAGA! W przypadku przewlekłego stanu zapalnego zaleca się stosowanie worka w ramach terapii ciepłem. Aby to zrobić, napełnij worek gorącą wodą i nałóż na bolesny obszar. Stała temperatura ciepła zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie oraz ogranicza skurcze.

- CIEPŁY/ZIMNY WOREK
- Z ZAWOREM ODPOWIERZAJĄCYM



TB-27

Ze względu na swój uniwersalny kształt orteza doskonale chłodzi lub rozgrzewa górne partie kręgosłupa. Produkt składa się z neoprenowej opaski oraz 2 okładów żelowych. Opaska, wyposażona w 4 mocowania, otacza górną partię pleców, zapewniając im tym samym stałą kompresję. 2 kompresy żelowe można wykorzystać dwojako:

- jako zimny lub ciepły okład dla górnej części mięśnia prostownika grzbietu i mięśni karku
- jako skuteczna termoterapia prawego i lewego mięśnia czworobocznego grzbietu.

- CIEPŁY/ZIMNY KOMPRES ŻELOWY



INNOWACYJNY



WYRÓB MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES REGULACJI



2 W 1



WOLNY OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW

TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM ORTEZA **KOLANA**

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

/chroniczny ból mięśniowy kolana,
/napięcia mięśni, skurcze,
/reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
/zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego.

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

/skręcenie kolana, zwichnięcie kolana,
/uszkodzenie więzadeł (ACL, PCL, MCL, LCL),
/kolano skoczka, kolano kinomaniaka,
/boczne przyparcie rzepek, zwichnięcie rzepek,
/uszkodzenie łąkotek, chondromalacja rzepek,
/kolano biegacza,
/niestabilność stawu kolanowego osteoartroza (OA),
/po zabiegach operacyjnych (artroskopia kolana).



ORTEZA KOLANA



ANATOMICZNY PIERŚCIEN
OKOŁORZEPKOWY

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

TERMALNA ORTEZA KOLANA



TB-28

Orteza kolana z pierścieniem okołorzepkowym wyposażona w specjalistyczny okład żelowy, zapewnia efekt krioterapii i ciepłolecznictwa. Orteza niweluje dolegliwości bólowe kolana w przypadku stłuczenia lub zmian zwyrodnieniowych. Kompres żelowy może być stosowany dwojako:

- umieszczony w zamrażalce lub lodówce zapewnia krioterapeutyczny efekt leczenia zimnem, doskonały w przypadku nagłych urazów mięśni i stawów.
- umieszczony w mikrofalówce zapewnia efekt leczenia ciepłem, skuteczny w przypadku przewlekłego bólu reumatycznego i neurologicznego.

W dolnej i górnej części wyrobu zastosowano gumę antymigracyjną.

 CIEPŁY/ZIMNY
 KOMPRES
ŻELOWY



INNOWACYJNY



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR
UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES
REGULACJI



2 W 1



WOLNY
OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ
SPECJALISTÓW



TERAPIA CIEPŁEM/ZIMNEM ORTEZA **BIODRA**

W S K A Z A N I E :

WERSJA CIEPŁOLECZNICZA:

/chroniczny ból mięśniowy stawu biodrowego,
/napięcia mięśni,
/skurcze,
/zmiany zwyrodnieniowe stawów,

WERSJA KRIOTERAPEUTYCZNA:

/osteoartroza biodra, /rwa kulszowa,
/syndrom pośladkowy,
/tendinopatia pośladkowa (zapalenie kaletki),
/zespół przywodzicieli,
/konflikt udowo-panewkowy (FAI),
/zespół bólowy tkanek miękkich (zapalenie kaletki lub tendinopatia mięśnia biodrowo-łędźwiowego),
/ból kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego,



NIE NAKŁADAĆ NA SKÓRĘ
JEŚLI PRODUKT JEST
GORĄCY!



ORTEZA BIODRA

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

THEMALBRACES.COM

TERMALNA ORTEZA BIODRA



TB-29

Termalna orteza biodra wyposażona w specjalistyczny okład żelowy, zapewnia efekt krioterapii i ciepłolecznictwa. Orteza doskonale chłodzi lub rozgrzewa staw biodrowy, zmniejszając jego dolegliwości bólowe, zarówno po urazie jak i w przypadku przewlekłych reumatoidalnych stanów zapalnych.

- umieszczony w zamrażalce lub lodówce zapewnia krioterapeutyczny efekt leczenia zimnem, doskonały w przypadku nagłych urazów mięśni i stawów..
- umieszczony w mikrofalówce zapewnia efekt leczenia ciepłem, skuteczny w przypadku przewlekłego bólu reumatycznego i neurologicznego.

W dolnej i górnej części wyrobu zastosowano gumę antymigracyjną.

 CIEPŁY/ZIMNY
 KOMPRES
ŻELOWY



INNOWACYJNY



WYRÓB
MEDYCZNY KL. I



ROZMIAR
UNIWERSALNY



SZEROKI ZAKRES
REGULACJI



2 W 1



WOLNY
OD LATEKSU



TRWAŁY



POLECANY PRZEZ
SPECJALISTÓW

UNIPREN


UniPren™ to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jersyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca UniPren™ to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku. Funkcja samoszczepna, surowca zdecydowanie ułatwia użytkowanie.



DZIANINA SZCZEPNA

PIANKA NEOPRENOWA

DZIANINA POLIAMIDOWA

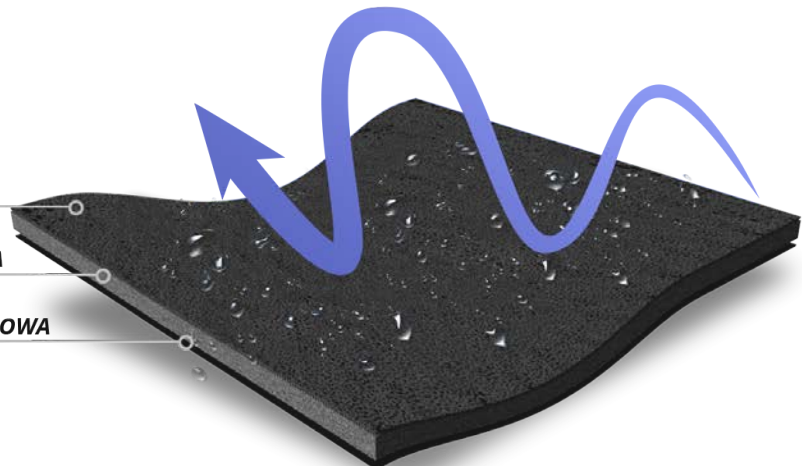

UNIPREN™

SPORTOWIEC AUSTIN CARTER

Odkąd pamiętam futbol był dla mnie bardzo ważny. Gram na pozycji rozgrywającego (QB). Zaczynałem w drużynie Itasca Community College Vikings, a następnie grałem dla Rivals Professional Football League. Jest to liga przygotowująca do gry w profesjonalnej Narodowej Lidze Futbolowej (NFL) i Kanadyjskiej Lidze Futbolu (CFL).

Podczas gry w futbol uderzenia, siniaki i urazy to powszechność. Jako rozgrywający wielokrotnie doznaję uszkodzenia barku i kręgosłupa lędźwiowego, które wymagają systematycznego chłodzenia i kompresji.

W tym celu, moi fizjoterapeuci polecieli mi **ortezy termiczne ThermalBraces™**, które zmniejszają ból i utrzymują moje mięśnie w dobrej kondycji. Dzięki nim, jestem zawsze gotowy na każdy mecz, podczas którego mogę skupić się na grze i dać z siebie wszystko.



**THERMAL
BRACES**

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

THERMALBRACES.COM

 reh4mat



 **REH4MAT sp. z o.o.**
Producent

ul. Zenitowa 5a,
35-301 Rzeszów,
POLSKA

Adres korespondencyjny:
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra
37-500 Jarosław
POLSKA

tel: 16 621 42 20
tel: 16 621 41 35
e-mail: biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com



thermalbraces.com