


INSTRUKCJA USTAWIENIA ZAKRESU RUCHOMOŚCI KĄTA ZGIĘCIA I WYPROSTU W SZYNY 2RP

Orteza została wyposażona w szynę boczną, która posiada blokadę kąta **zgięcia (A)** w zakresie: 0°, 10°, 30°, 40°, 60°, 75°, 90° oraz blokadę **wyprostu (B)** w zakresie: 10°, 20°, 30°, 40°.

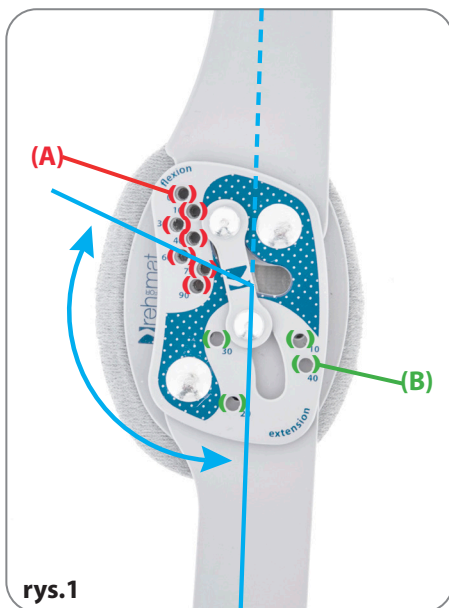

1. Ustaw ortezę w przybliżonym położeniu, w którym chcesz ograniczyć **zgięcie/wyprost (rys.1)**
2. Wkręć wkręt/wkręty w otwór oznaczony odpowiednią wartością kąta i sprawdź poprawność działania oraz zakres ruchów zegara (**rys.2**)

ZAKRES RUCHÓW I JEGO WARTOŚCI KĄTOWE USTALA LEKARZ PROWADZĄCY!

UWAGA: Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprostu. Szyny boczne nie wymagają konserwacji.



REH4MAT sp. z o.o.

ul. Zenitowa 5a, 35-301 Rzeszów | Polska

tel. +48 16 621 42 20


tel. +48 16 621 41 35

e-mail: biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com

HOW TO SET UP THE FLEXION AND EXTENSION IN 2RP SPLINT - INSTRUCTION

2RA PRECISION SPLINT is equipped with the following ROM adjustment **flexion (A)** in the scope of: 0°, 10°, 30°, 40°, 60°, 75°, 90° and **extension (B)** in the scope of: 10°, 20°, 30°, 40°.

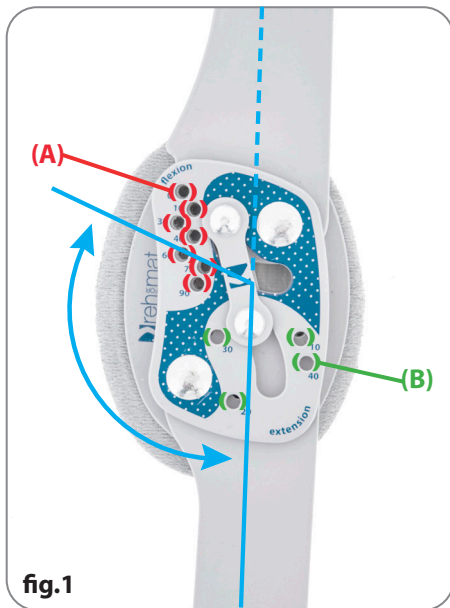

1. Position the brace in the approximate position where you want to limit the **flexion/extension** (fig.1)
2. Drive the screw/bolts into the hole marked with the appropriate angle value and check the correct operation and the range of clock movements (fig.2)

THE ANGLE OF FLEXION AND EXTENSION IS SPECIFIED BY THE DOCTOR OR PHYSIOTHERAPIST!

ATTENTION: If the brace is equipped with 2 side splints, adjustment is done on each side splint separately setting the same angle of flexion and extension. Side splints do not require maintenance.



REH4MAT sp. z o.o.

ul. Zenitowa 5a, 35-301 Rzeszów | Polska

tel. +48 16 621 42 20

tel. +48 16 621 41 35

e-mail: biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com