



KOD KATALOGOWY	AM-KG-AR/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	AM-KG-AR/1R
CODE	AM-KG-AR/1R
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	AM-KG-AR/1R

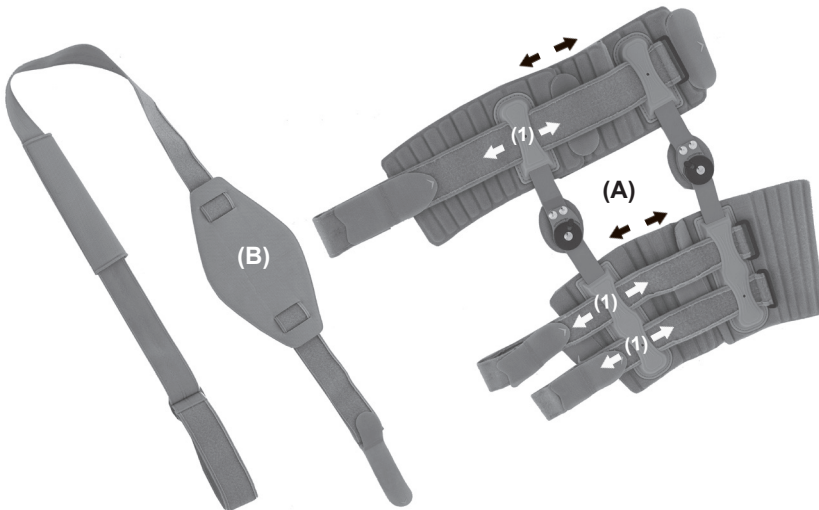


A. Orteza / Brace
B. Temblak / Sling



- 1. PL:** Rozepnij ortezę (A) i poluzuj taśmy obwodowe (1) w celu dopasowania obwodu.
EN: Unfasten the brace (A) and loosen the circumferential straps (1) to adjust the fit.

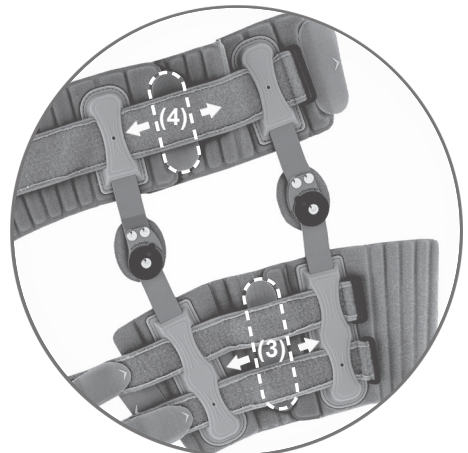

- 2. PL:** Załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby zegary szyny znajdowały się na nadkłykcii bocznej kości ramiennej (2). W tym celu dopasuj obwód rękawów za pomocą rzepów (3,4).
EN: Place the brace on the upper limb, to keep the drop lock on the lateral epicondyle (2). To achieve this, adjust the circumference of the sleeves using the Velcro straps (3,4).

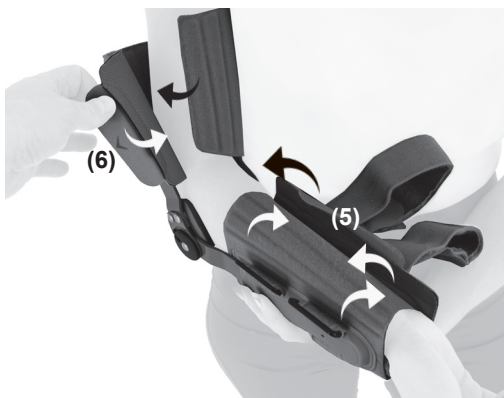


- 3. PL:** Zapnij opaski z przodu na rzepy (5,6).
EN: Fasten the front straps using the Velcro (5,6).

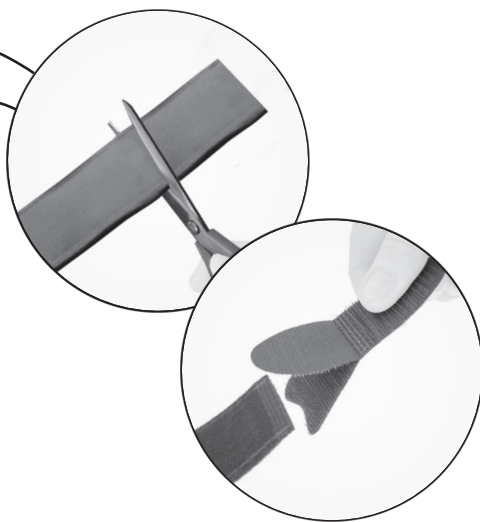
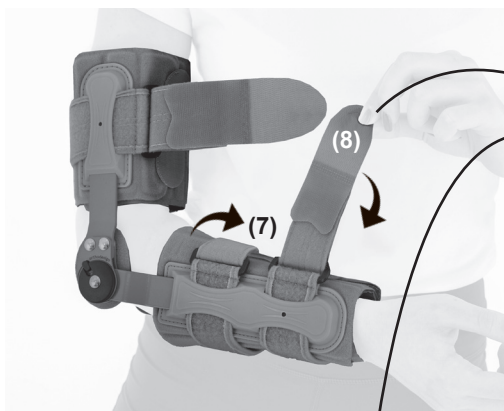


- 4. PL:** Przepleć taśmy przez klamry i zapnij rzepy według podanej kolejności (7,8,9). Jeśli jest potrzeba odepnij rzep, odetnij ich zbędną długość i ponownie przypnij rzepy.

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro in the given order (7,8,9). If necessary, unfasten the Velcro, trim any excess length, and reattach the Velcro..

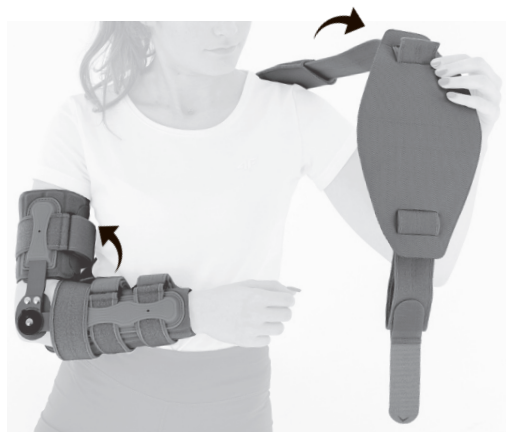

- 5. PL:** Załóż pętelkę temblaka (B) na przedramię i przełóż pasek przez ramię według wskazanego kierunku.
EN: Place the sling loop (B) on your forearm and the strap over your shoulder according to the indicated direction.

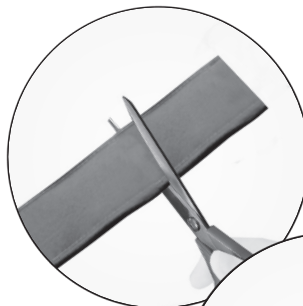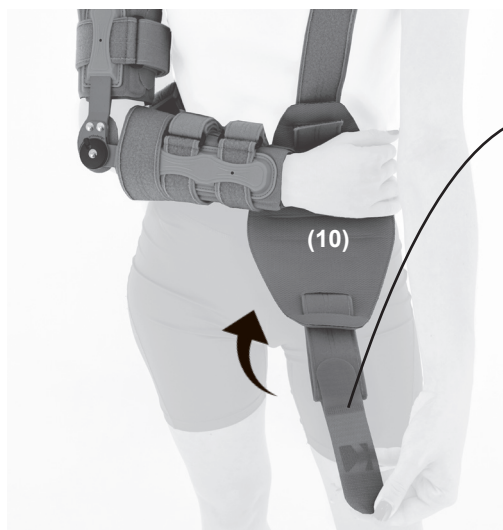

- 6. PL:** Przyłóż rękę do temblaka (10) i zapnij na rzep (11).
 Jeśli jest potrzeba odepnij rzep, odetnij jego zbędną długość i ponownie przypnij rzepy.
EN: Place your wrist in a sling (10) and fasten it with Velcro (11). If necessary, unfasten the Velcro, trim any excess length, and reattach the strap.



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.