



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-L-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	AM-OSN-L-01
CODE	AM-OSN-L-01
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	AM-OSN-L-01




- A. Orteza / Brace**
B. Osłona palców/ Finger cover
C. Temblak / Sling

- 2. PL:** Połóż rękę na ortezie (A) i ustaw separator palców (1) w odpowiednim miejscu.
EN: Place your hand on the orthosis (A) and set the finger separator (1) in the right place.


- 1. PL:** Rozepnij orteżę.
EN: Unfasten the brace.

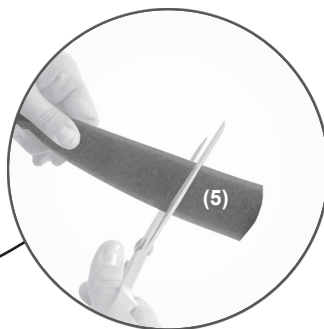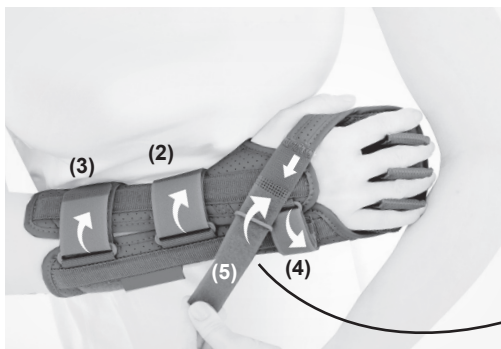



- 3. PL:** Zapnij taśmy obwodowe przedramienia (2,3) i taśmy dodatkowe (4,5) w podanej kolejności. Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość taśmy (5).
EN: Fasten the forearm circumferential straps (2,3) and the additional tapes (4,5) in the order shown. If necessary, cut off any excess part (5).

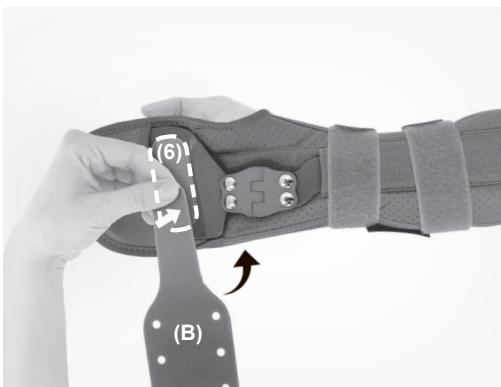



- 4. PL:** Przypnij osłonę palców (B) do rzepa (6), oplatając nią palce.
EN: Attach the finger cover (B) to the Velcro (6) and wrap it around your fingers.

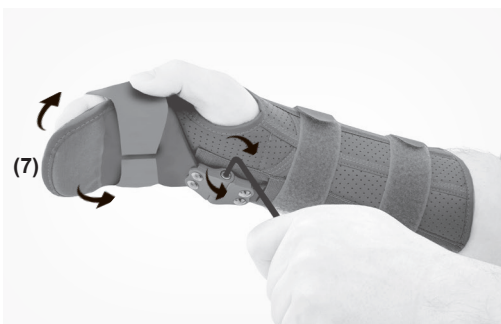

- 5. PL:** Za pomocą kluczyka imbusowego, ustaw odpowiednią pozycję dłoni (7).
EN: Adjust the required hand position with the Allen key (7).

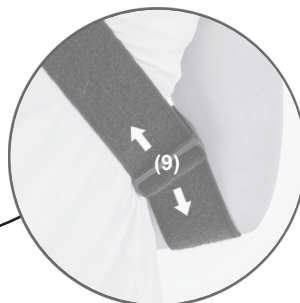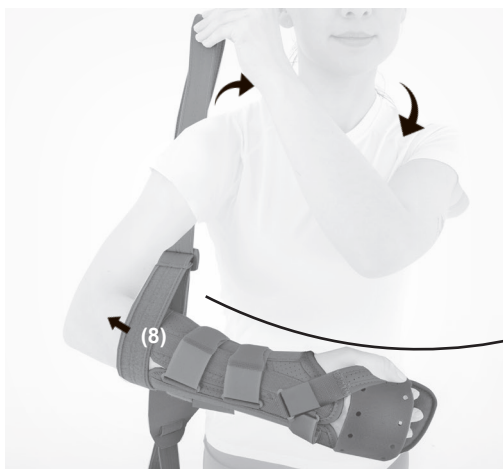

- 6. PL:** Załóż pętelkę temblaka na przedramię (8) i przełóż pasek przez ramię.
EN: Place the sling loop on your forearm (8) and the strap over your shoulder.
- 7. PL:** Przy pomocy regulatora (9) dopasuj pętelkę temblaka do obwodu przedramienia.
EN: Using the a regulator (9), fit the loop of the sling to the circumference of your forearm.

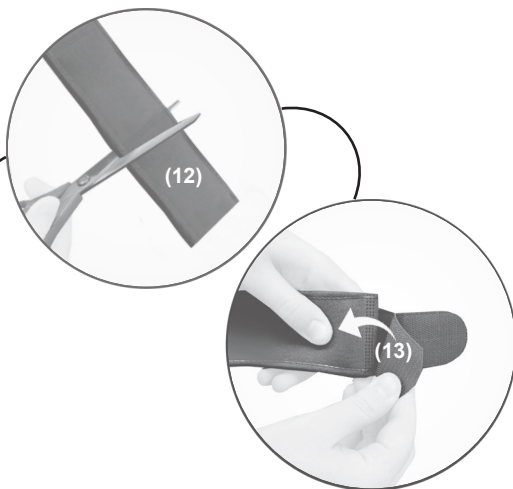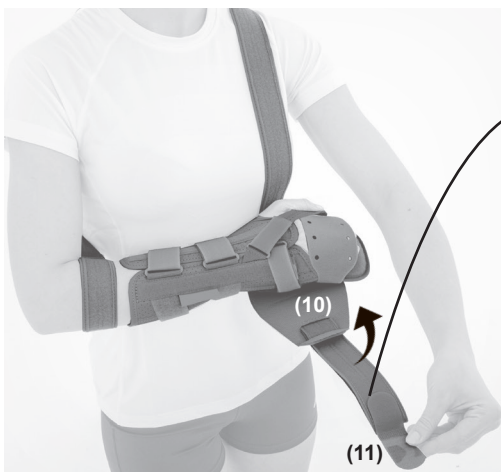

- 8. PL:** Połóż rękę na elemencie termoforowanym temblaka (10) i zapnij taśmę na rzep (11).
EN: Place your hand on the thermoformed part of the sling (10) and close the Velcro tape (11).

- 9. PL:** Jeśli jest potrzeba, odetnij zbędną długość taśmy (12). Dopnij rzep (13) do paska i zapnij go.
EN: If necessary, cut off any unnecessary length of tape (12). Attach the Velcro (13) to the strap and close it.



- 10. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.