


KOD KATALOGOWY	AM-OSN-L-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	AM-OSN-L-01
CODE	AM-OSN-L-01
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	AM-OSN-L-01

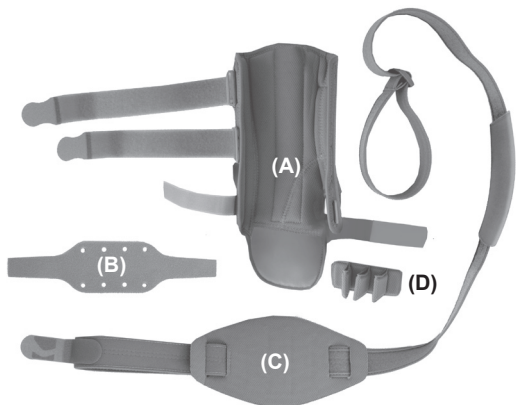

- A. Orteza / Brace
- B. Osłona palców / Fingers cover
- C. Temblak / Sling
- D. Separator palców / Fingers separator


1. **PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

2. **PL:** Połóż rękę na ortezie (A) i umieść palce w separatorze (D).
EN: Place your hand on the brace (A) and put your fingers in the separator (D).




3. **PL:** Zapnij taśmy obwodowe w nadgarstku (1) i w przedramieniu (2) na rzepy. Jeśli istnieje potrzeba skoryguj ustawienie separatora (D). Następnie zapnij taśmy (3,4) w podanej kolejności. Jeśli istnieje potrzeba, odetnij ich zbędną długość.



EN: Fasten the circumferential straps on the wrist (1) and in the forearm (2) with Velcro fasteners. You can correct the setting of the separator (D). Then fasten the tapes (3,4) in the order shown. If necessary, cut off their excess length.

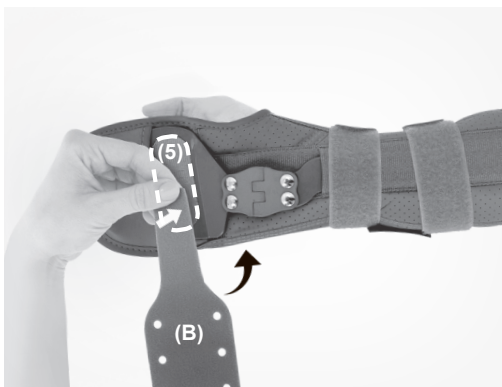

- 4. PL:** Przypnij osłonę palców (B) do rzepa (5), oplatając nią palce.
EN: Attach the finger cover (B) to the Velcro (5) and wrap it around your fingers.


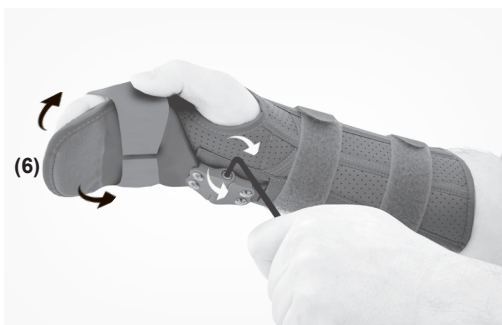


- 5. PL:** Za pomocą kluczyka imbusowego, ustaw odpowiednią pozycję dłoni (6).
EN: Adjust the required hand position with the Allen key (6).

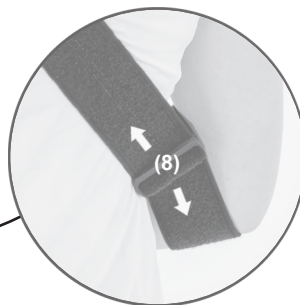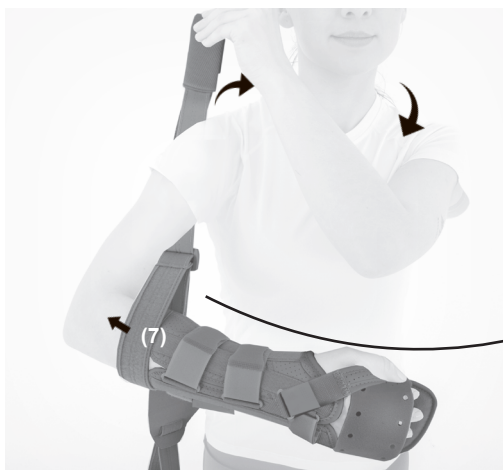

- 6. PL:** Załóż pętelkę tembla na przedramię (7) i przełóż pasek przez ramię.
EN: Place the sling loop on your forearm (7) and the strap over your shoulder.
- 7. PL:** Przy pomocy regulatora (8) dopasuj pętelkę tembla do obwodu przedramienia.
EN: Using the regulator (8), fit the loop of the sling to the circumference of your forearm.

- 8. PL:** Ustaw osłonę szyi (9) w odpowiednim miejscu.
EN: Place the neck (9) cover in the right place.

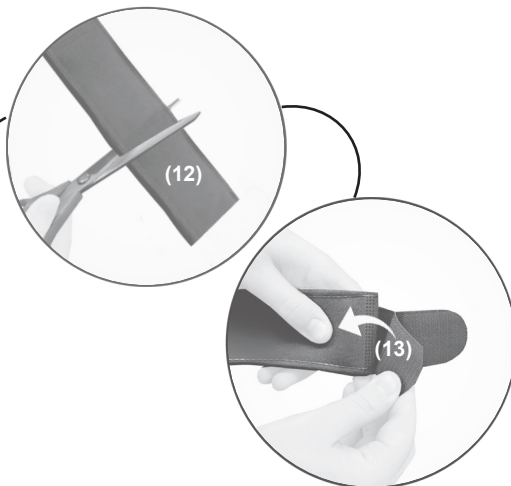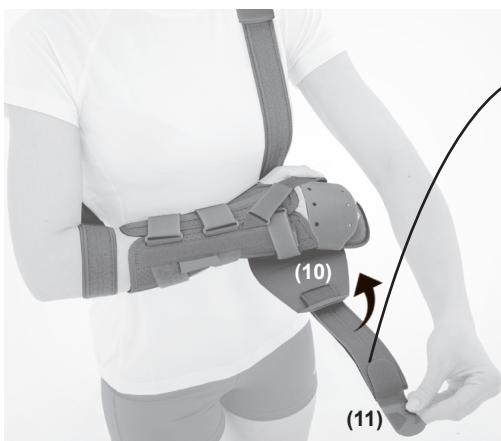

- 9. PL:** Połóż rękę na elemencie termoforowanym temblaka (10) i zapnij taśmę na rzep (11).
EN: Place your hand on the thermoformed part of the sling (10) and close the Velcro tape (11).

- 10. PL:** Jeśli jest potrzeba, odetnij zbędną długość taśmy (12). Dopnij rzep (13) do paska i zapnij go.
EN: If necessary, cut off any unnecessary length of tape (12). Attach the Velcro (13) to the strap and close it.



- 11. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.