


KOD KATALOGOWY	AM-PES-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PLECÓW
MODEL	AM-PES-02
CODE	AM-PES-02
TRADE NAME	BACK ORTHOSIS
MODEL	AM-PES-02



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

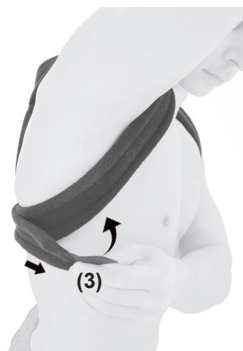

- 2. PL:** Przepleć pasy przez klamki (1) i załóż ortezę na ramiona.

EN: Fasten the Velcro straps (1) and place the brace on the shoulders.

- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy (2,3).
EN: Set the required level of compression and fasten the Velcros (2,3).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.