


KOD KATALOGOWY	AM-SOB-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-SOB-02
CODE	AM-SOB-02
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-SOB-02

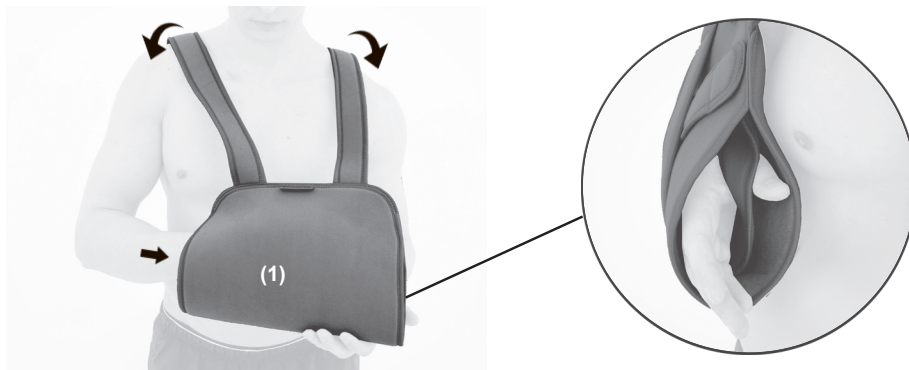

- 1. PL:** Załóż temblak (1) i zabezpiecz kciuk przed wysuwaniem za pomocą wewnętrznego paska.  
**EN:** Put the sling (1) and protect the thumb against movement with inner strap.



- 2. PL:** Skrzyżuj tylne pasy naramienne.  
**EN:** Cross the shoulder straps.



- 3. PL:** Zapnij rzepowe zapięcia (2,3) z przodu temblaka.  
**EN:** Fasten the Velcro closures (2,3) on the sling.



- 4. PL:** Przytnij pas obwodowy (4), owiń go wokół tułowia i zapnij z przodu.  
**EN:** Attach the immobilizer band (4), wrap around the trunk and fasten the Velcro closure.



- 5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.