



KOD KATALOGOWY	AM-SOB-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-SOB-03
CODE	AM-SOB-03
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-SOB-03

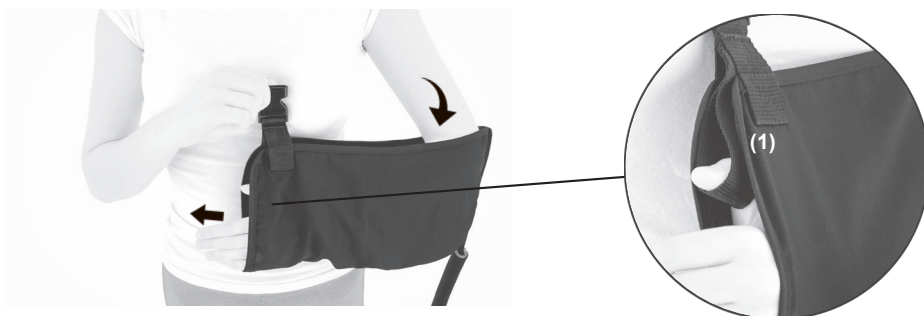

- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę. Jeśli jest taka potrzeba, umieść kciuk w specjalnej pętelce (1).  
**EN:** Put the arm to the sling. Place your thumb in the thumb loop if you need (1).



- 2. PL:** Przelóż pasek przez ramię i zapnij temblak na klamerkę.  
**EN:** Place the belt through the shoulder and fasten the sling with the buckle.

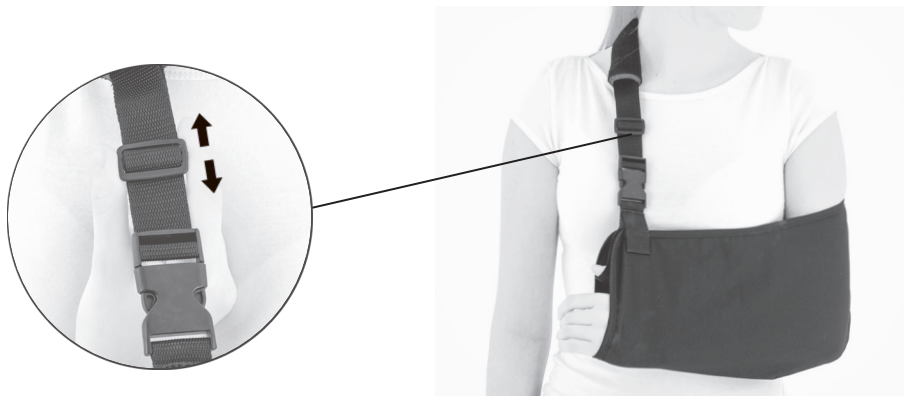

- 3. PL:** Za pomocą regulatora dopasuj długość taśmy.  
**EN:** Use the buckle to adjust the length of the tape.
- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.