

KOD KATALOGOWY	AM-SOB
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-SOB
CODE	AM-SOB
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-SOB



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj paski. Umieść ortezę (1) na ramieniu.
EN: Unfasten the brace and loosen the straps. Place the brace (1) on your shoulder.



- 2. PL:** Zapnij rzep ramienny (2).
EN: Fasten the shoulder Velcro (2).



- 3. PL:** Umieść osłonę (3) pod pachą.
EN: Place the cover (3) under your armpit.



- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu zapinając pas piersiowy z tyłu (4) i z przodu (5) na rzepy.
EN: Set the appropriate level of compression by fastening the chest strap at the back (4) and front (5) with Velcro.





- 5. PL:** Za pomocą pasów naramiennych (6,7,8) ustaw ramię w pożądaną pozycję.
EN: Use the rotator cuff straps (6,7,8) for keeping the arm in the required position.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.