



KOD KATALOGOWY	AR-SO-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	AR-SO-02
CODE	AR-SO-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	AR-SO-02

- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj pasy dociągowe (1).  
**EN:** Unfasten the brace and loosen the tension belts (1).

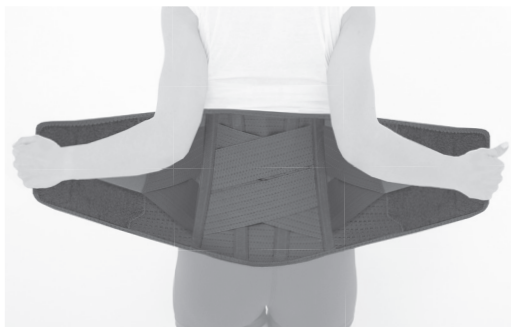

- 2. PL:** Przyłóż ortezę w okolicę lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa i zapnij przednie zapięcie na rzep (2).  
**EN:** Place the brace on your lower back and fasten the Velcro closure (2).

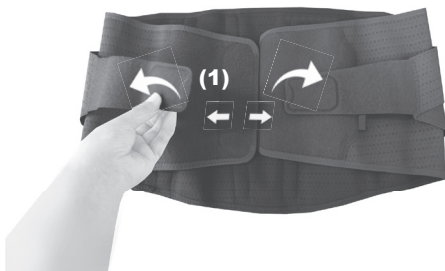

- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję za pomocą pasów dociągowych (3) i zapnij rzepy na przednim zapięciu.  
**EN:** Set the appropriate level of compression with the tension belts (3) and fasten the Velcro fasteners on the front closure.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.