


KOD KATALOGOWY	AS-L-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	ORTEZA ŁOKCIA AS-L-01
CODE	AS-L-01
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	ELBOW ORTHOSIS AS-L-01



1. PL: Rozepnij ortezę i w zależności od schorzenia, umieść pelotę (1) po stronie bocznej stawu (łokieć tenisisty) bądź przyśrodkowej (łokieć golfisty).

EN: Unfasten the brace and depending on your condition, place the silicone pad (1) on the lateral side of the joint (tennis elbow) or on the medial side (golfer's elbow).

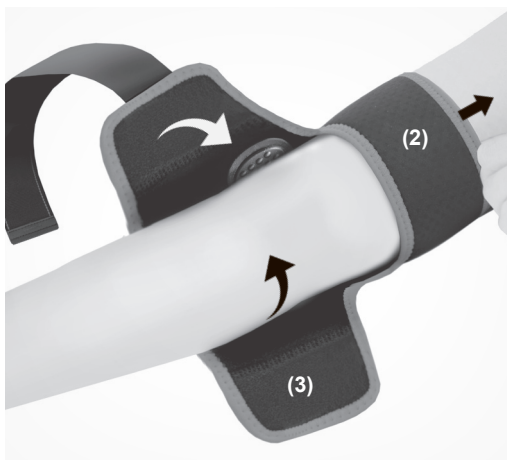

2. PL: Załóż ortezę na rękę (2) i zapnij rzep (3).

W razie potrzeby, skoryguj ustawienie peloty.

EN: Put the brace on your arm (2) and fasten the Velcro (3). Adjust the pelotte setting if necessary.



3. PL: Przepleć pasek (4) przez klamrę i zapnij na rzep. Istnieje możliwość przypięcia paska w dowolnym miejscu na elemencie przedramienia.

EN: Interlace the strap (4) through the buckle and fasten with Velcro. It is possible to attach the strap anywhere on the forearm.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.