


KOD KATALOGOWY	AS-LK-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	AS-LK-02
CODE	AS-LK-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	AS-LK-02

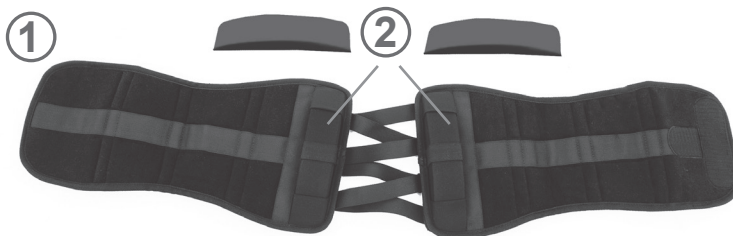

PL: WYRÓB SKŁADA SIĘ Z:

1. Ortezy lędźwiowo-krzyżowej
2. Dwóch oddzielających pelot lędźwiowych (można stosować z pelotami lub bez)

EN: THE PRODUCT CONSISTS OF:

1. Back brace
2. Two foam lumbar pads (it can be used with or without lumbar pads)



- 1. PL:** Przyłóż ortezę do pleców (1) i zapnij z przodu (2).

EN: Place the brace on your back (1) for perfect fitting of the foam pads to your lumbar curve and close it (2).



- 2. PL:** Ustaw właściwą kompresję wyrobu przez naciągnięcie pasa za pomocą klamerek z rzepem. Zapnij element na przedniej części wyrobu.

EN: Set the required level of compression by pulling the strap. Attach the Velcro into abdominal part of the back brace.





3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.