


KOD KATALOGOWY	EB-L
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	EB-L
CODE	EB-L
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	EB-L

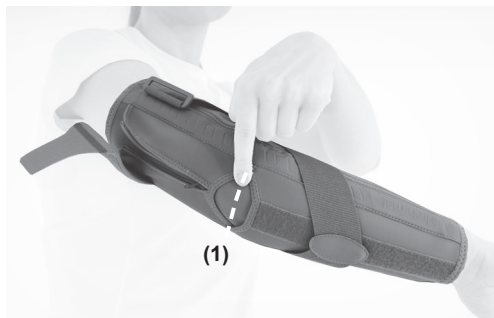

- 1. PL:** Rozepnij ortezę i załóż na rękę w taki sposób, aby łokieć (1) znalazł się w odpowiednim miejscu.
EN: Unfasten the brace and put it on your arm, so that the elbow (1) is in the right place.




- 2. PL:** Zapnij suwak górny (2) i dolny (3).
EN: Close the top (2) and bottom (3) zippers.



- 3. PL:** Przepleć pasek przez klamrę i zapnij na rzep (4).
EN: Interlace the strap through the buckles and fasten the Velcro (4).



- 4. PL:** Odepnij taśmę z rzepem (5), ustaw odpowiedni kąt zgięcia ręki i ponownie przypnij rzep.
- EN:** Unfasten the Velcro strap (5), set the correct flexion angle of the arm and reattach the Velcro.

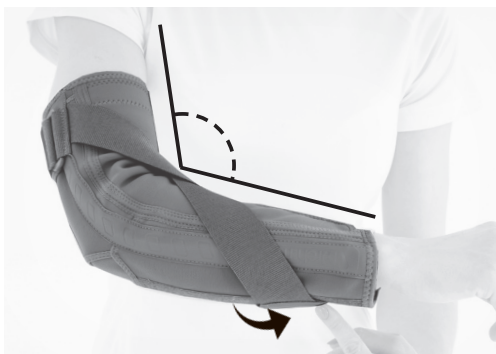

- 5. PL:** Gotowy wyrób.
- EN:** Product is ready to use.