



KOD KATALOGOWY	U-SL
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	U-SL
CODE	U-SL
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	U-SL

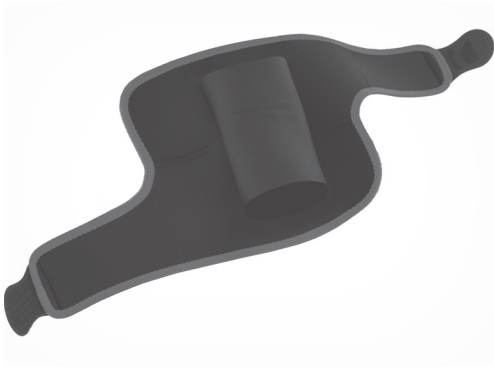

1. PL: Rozepnij ortezę następnie wsuń rękę w rękaw ortozy ustawiając go na zgięciu łokcia.

EN: Unfasten the brace, then slide your hand into the brace sleeve, positioning it on the bend of your elbow.

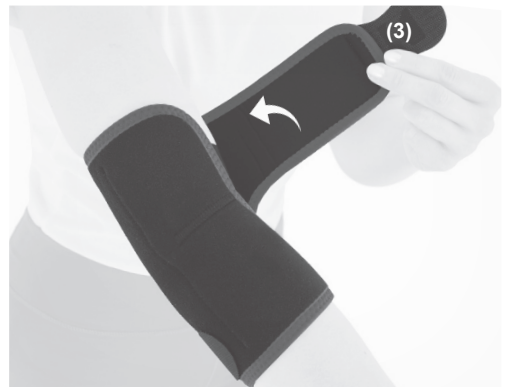

2. PL: Zapnij rzep na przedramieniu (2), następnie rzep na ramieniu (3) ustawiając odpowiednią kompresję.

EN: Fasten the Velcro on the forearm (2), then the Velcro on the arm (3), setting the appropriate compression.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.