

KOD KATALOGOWY	U-SS-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	U-SS-01
CODE	U-SS-01
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	U-SS-01




- 1. PL:** Rozepnij ortezę i załóż na nogę (1).
EN: Unfasten the brace and put it on the leg (1).



- 2. PL:** Zapnij górny rzep (2).
EN: Fasten the upper Velcro (2).



- 3. PL:** Przypnij rzep stabilizujący (3) do bocznej części ortezi.
EN: Attach the stabilizing Velcro (3) to the side of the brace.

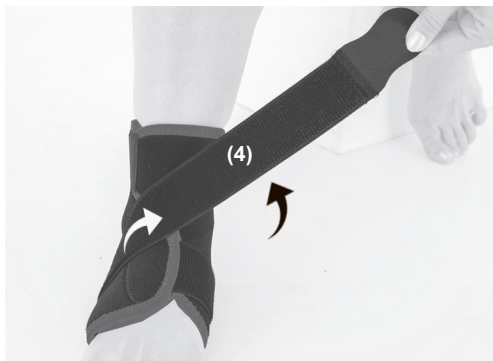

- 4. PL:** Opleć pas ATFL (4) wokół stopy we wskazanym kierunku.
EN: Wrap the ATFL belt (4) around your foot in the direction shown.



- 5. PL:** Zapnij pas na rzep (5) w górnej części ortezi.
EN: Fasten the Velcro strap (5) on the top of the brace.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.