



WIRTUOZERIA WŚRÓD ORTEZ

Poszukując idealnego dopasowania ortezy do ciała postanowiliśmy zrewolucjonizować myślenie o technologii tworzenia ortez. Pragnęliśmy, aby orteza była w stanie „nauczyć się” indywidualnego kształtu ciała umożliwiając tym samym perfekcyjne dopasowanie, a następnie utrwalenie go dla zapewnienia pełnej stabilizacji. Takie dopasowanie jest w stanie w najdokładniejszy sposób wspierać kończynę w powrocie do pełni funkcjonalności zarówno po cięższych jak i lżejszych urazach. Aby urzeczywistnić nasze marzenia zastosowaliśmy surowiec MEMORYcast, umożliwiający dowolne modelowanie ortezy po podgrzaniu jej do około 60°C, po ostygnięciu orteza zachowuje nadany kształt. Jest przy tym dużo lżejsza od tradycyjnego gipsu. FixCast Braces[®] to najlepsze rozwiązanie dla leczenia urazów ortopedycznych i neurologicznych u dzieci.

ORTEZY KOŃCZYNY GÓRNEJ



FIX-KG-01



FIX-KG-02



FIX-KG-03



FIX-KG-04



FIX-KG-05



FIX-KG-06



FIX-KG-07



FIX-KG-08



FIX-KG-10



FIX-KG-11



FIX-KG-13



FIX-KG-09

ORTEZY KOŃCZYNY DOLNEJ



FIX-KD-01



FIX-KD-02



FIX-KD-03



FIX-KD-04



FIX-KD-05



FIX-KD-06



FIX-KD-07



FIX-KD-08



FIX-KD-09



FIX-KD-10



FIX-KD-12



FIX-KD-13

POZOSTAŁE ORTEZY



FIX-KG-09



FIX-KG-12



FIX-T-01



FIX-KD-11

Łatwy start:

1

Podgrzej ortezę FIXCAST do temp. 60°C w ciepłej wodzie lub w kuchenke mikrofalowej lub w kombiwarze.

2

Poczekaj aż orteza ostygnie do temperatury bezpiecznej dla ciała.

3

Przyłóż ortezę do kończyny, dopasowując ją do indywidualnego kształtu ciała.

4

Zdejmij ortezę, odłóż do ostygnięcia.

5

Po całkowitym ostygnięciu orteza jest gotowa do używania, kształt jest utrwalony. W razie konieczności zmiany kształtu należy powtórzyć punkty od 1 do 4.