

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-O/2RA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-O/2RA
CODE	AM-OSK-O/1R-01
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-O/2RA



1. PL: Załóż ortezę na nogę i zapnij rzepy według numeracji (1, 2).

EN: Put the orthosis on the leg and fasten the Velcro straps according to the following steps (1, 2).



2. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (3,4,5,6).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (3,4,5,6).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.