


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-ZJ/2RA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-ZJ/2RA
CODE	AM-OSK-ZJ/2RA
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-ZJ/2RA


1. PL: Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym.

EN: Place the brace on the leg and pull up to keep the kneecap in the patellar hole.

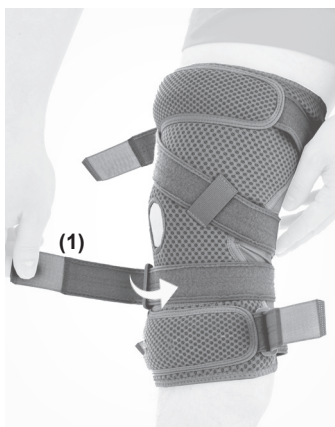

2. PL: Zapnij rzepy według kolejności (1,2,3,4,5).

EN: Fasten the Velcro closures according to the following steps (1,2,3,4,5).

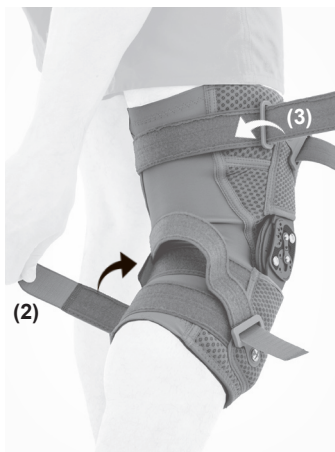



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.