

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/2RA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-Z/2RA
CODE	AM-OSK-Z/2RA
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-Z/2RA



1. PL: Podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym i zapnij rzep (1).
EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar hole and fasten the Velcro closures (1).

2. PL: Zapnij ortezę na rzep w podanej kolejności (2,3,4).
EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (2,3,4).



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.