


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/S-X
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
MODEL	AM-OSK-Z/S-X
CODE	AM-OSK-Z/S-X
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSK-Z/S-X



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i załóż na nogę w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółorzepkowym (1).
- EN:** Unfasten the brace and put on the leg, so that the kneecap is in the patellar donut (1).

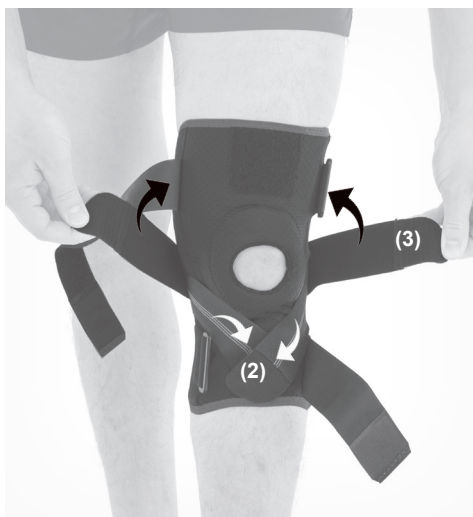

- 2. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję dolnych i górnych pasów krzyżowych (2 i 3) i zapnij je na rzepy według podanej kolejności.
- EN:** Set the appropriate compression for the lower and upper cross straps (2 and 3) and fasten them with Velcro according to the following steps.

- 3. PL:** Przepleć taśmy (4,5) przez klamkerki i zapnij je na rzepy.
- EN:** Interlace the straps (4,5) through the buckles and close them with Velcro.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.