


KOD KATALOGOWY	AM-TUD-KD*
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-TUD-KD
CODE	AM-TUD-KD*
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-TUD-KD

A: Podstawa ortezy / Orthosis base
B,C: Elementy boczne / Side elements




1. PL: Odepnij elementy boczne (B i C) od podstawy ortezy (A).

EN: Detach the side pieces (B and C) from the brace base (A).

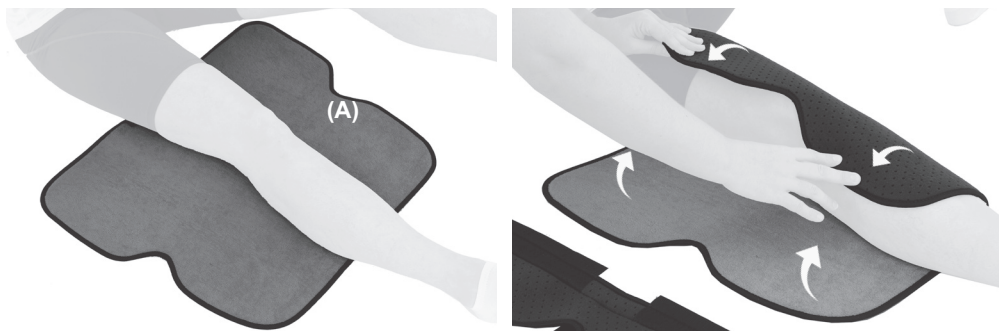

2. PL: Zawsze zakładaj stabilizator na siedząco. Dopasuj element (A) z wyprofilowanymi stawkami do nogi.

EN: Always put the stabilizer on when seated. Fit the element (A) with orthopaedic stays to the leg.

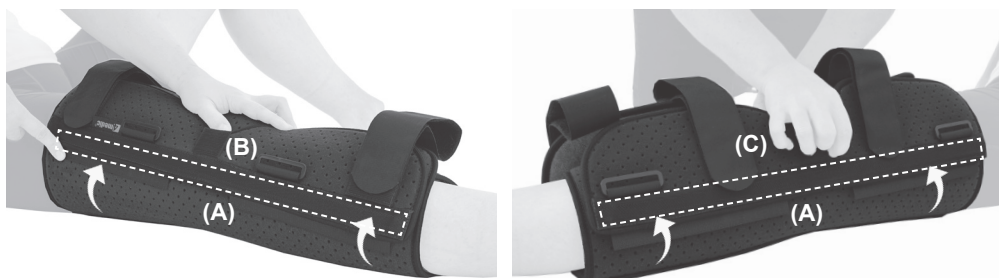


3. PL: Przypnij elementy boczne (B i C) do podstawy ortezy (A) od zewnętrznej i wewnętrznej strony nogi.

EN: Attach the side pieces (B and C) to the orthosis base (A) from the outside and inside of the leg.



UWAGA!
ATTENTION!

PL: Boczne usztywnienia powinny być ustawione po bokach stawu kolanowego.
EN: The side elements should be positioned on the sides of the knee joint.

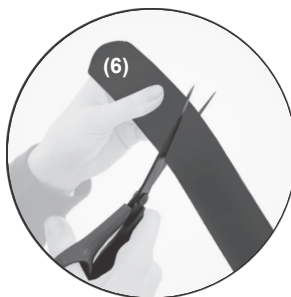

4. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij na rzepy w podanej kolejności (1,2,3,4,5). Zapinanie ortozy zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego. Jeżeli istnieje potrzeba odetnij zbędną długość taśmy.

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them with Velcro in the given order (1,2,3,4,5). Always start fastening the brace with the straps closest to the knee joint. If necessary, trim any excess strap length..



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.