



EB-KS

ПОЛУЖЁСТКИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ОРТЕЗ PROFIT

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Шейный ортопедический воротник полужёсткий типа Florida, выполнен из специально подобранной полиэтиленовой пены и трикотажем ProFit. Это двухслойный трикотаж, который отлично подгоняется под контуры тела пациента, он растягивается во всех направлениях отлично моделируя форму и создаёт эффект «второй кожи». Внешний слой из спандекса отвечает за соответствующую компрессию и подгонку изделия, сокращает колебание мышц, возникающее во время физической нагрузки. Внутренняя мембрана с микрофибры, хлопчатника и эластана отвечает за удержание соответствующего климата кожи и пропускание влаги, её структура гарантирует бархатную мягкость в прикосновении.

ОСОБЕННОСТИ

Стабилизирует и разгружает позвоночник в шейном отделе, разгружает мышцы шеи. Показания и применение в зависимости от назначения лечащего врача.

ПОКАЗАНИЯ

- при острых и длительных болевых ощущениях в области шей и плеч вызванных травмой, перегрузкой или

- при дегенеративных изменениях шейного отдела позвоночника объединенных с неврологическими симптомами (шейный радикулит, парестезии верхних конечностей, сотрясения головы и нарушения чувства равновесия)
- при головных болях и шуме в ушах
- при кривошеи вызванной разными причинами

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- чувство удушья и дискомфорт, усиление болезненных симптомов может значительно ограничить или прекратить применение ортеза (особенно у людей с гипертрофией щитовидной железы, при значительной полноте, при усиленных невротических нарушениях)-необходимо согласовать лечение с врачом .
- нужно особенно контролировать правильность применения ортеза в соответствии с рекомендациями врача у детей, людей с нарушениями памяти, психически больных
- в случае изменений кожного покрова в месте прилегания (нарушения эпидермиса, ранения, кожных экзем) применение ортеза ограничено - возможно после наложения повязки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Исключительно правильно подобранный, подогнанный и примененный в соответствии с рекомендациями лечащего врача ортез исполняет заложенную функцию - инструктаж заложения предоставляет лечащий врач или квалифицированный техник- реабилитант. В первоначальном периоде использования, при высокой температуре окружающей среды и у людей с нарушениями чувствительности необходим частый контроль состояния кожи в месте прилегания ортеза. Продолжительное применение ортеза может привести к утрате мышечной массы . Рекомендовано систематическое выполнение упражнений, которые подбираются индивидуально для данного пациента ортопедом или техником реабилитации .При длительном применении полагаться ограничивать время использования до необходимого минимума в течении суток .Кожа в месте прилегания ортеза должна быть чистая (не следует применять мазей, кремов, лечебных компрессов непосредственно перед заложением) Неправильное хранение изделия - нетщательная стирка и полоскание может привести к возникновению кожных изменений связанных с усиленной потливостью под ортезом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Стирать вручную в теплой воде с добавлением мыла в температуре 30 градусов

- Не гладить.
- Не использовать хлорсодержащих отбеливателей
- Сушить вдали от источников тепла.

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ



Изделие медицинского назначения кл. 1 - удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556 Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

☞ 2011

REH4MAT
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.
POLAND
tel.: +48 (17) 851 66 30;
tel./fax: +48 (17) 851 62 23
e-mail: biuro@reh4mat.com
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,
fax +48 017 864-04-71;

