
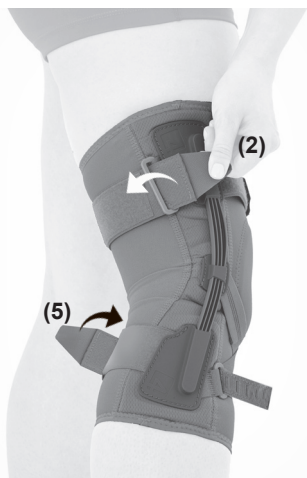


KOD KATALOGOWY	EB-SK/A
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	EB-SK/A
CODE	EB-SK/A
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	EB-SK/A

**1. PL:** Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w pierścieniu okolorzepkowym (1).

**EN:** Unbuckle the straps, put the brace on your leg and pull it up so that the kneecap is in the patellar donut (1).

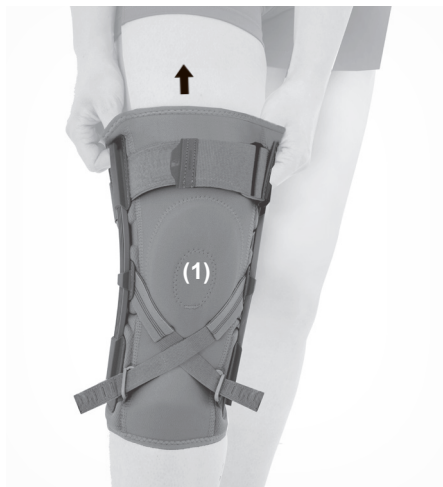

**2. PL:** Przepleć taśmy przez klamerki i zapnij w podanej kolejności (2,3,4,5,6).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (2,3,4,5,6).



**3. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.