

RU



AM-SO-04

## ОРТЕЗ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ

### ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Ортез пояснично-крестцовый выполнен из лёгкой, хлопковой ортопедической резины позволяющей коже свободно дышать. Снабжен четырьмя профилируемыми ортопедическими вкладышами и двумя эластичными затягивающими мисья стабилизирующими поясами, которые регулируют силу и высоту фиксации. Стабилизирует пояснично-бедренный сустав и нижний отдел позвоночника L4-L5-S1. Он уменьшает болевые симптомы, предотвращает их появлению, улучшает двигательную чёткость пациента.

### ОСОБЕННОСТИ

1. Изделие очень комфортно для кожи пациента - бандаж выполнен из специальной ортопедической резины состоящей главным образом из хлопка, которая нейтральна для кожи пациента.
2. Большая эффективность стабилизации - благодаря применению уникальных анатомически смоделированных ортопедических вкладышей а так же подбору оптимальной формы удалось получить исключительную фиксацию.
3. Комфорт использования - благодаря небольшому весу изделия пациент чувствует себя комфортно

### ПОКАЗАНИЯ

Ортез можно применять в случаях:  
При острых болевых ощущениях пояснично-крестцового отдела,  
Артрита позвоночника в пояснично-крестцовом отделе  
Дископатия поясничного отдела,  
После операций поясничного отдела позвоночника

После снятия гипса в пояснично-крестцовом отделе как стабилизатор,  
Деформации позвоночника в поясничном отделе.  
Смещению позвонков в поясничном отделе  
Состояния перегрузки пояснично-крестцового отдела

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Ортеза не полагаться применять в случае::

- Свежих ран
- повреждений эпидермиса
- кожных экзем
- кожных аллергий
- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
- гипертонии 3 степени

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

1. Применять согласно показаний и под контролем врача.
2. Изделие должно быть в первый раз заложено пациенту врачом или подготовленным медицинским персоналом.
3. По мере возможности применять изделие на хлопковое белье.
4. Не применять ортез если раньше употребили мазь или разогревающий гель.
5. В случае неправильно подобранного размера ортеза, может наблюдаться временное нарушение работы кишок и внутренних органов а так же дыхательной функции.
6. Недостаток ежедневной личной гигиены или неправильная консервация и стирка изделия могут вызвать вытравления эпидермиса, или появление аллергичных реакций связанных с усиленной потливостью и развитием бактериальной флоры.



### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Стирать вручную в теплой воде с добавлением мыла в температуре 30 градусов
- Не гладить.
- Не использовать хлорсодержащих отбеливателей
- Сушить вдали от источников тепла.

### СОСТАВ

Резина ортопедическая, пояс VELCRO, ортопедическое вкладыши, скобка полиамидная, Эластан

### СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ

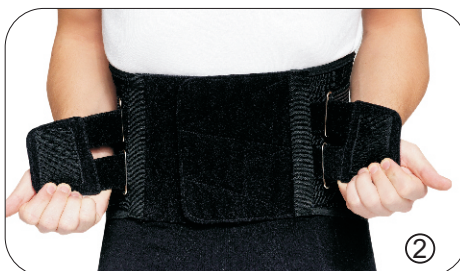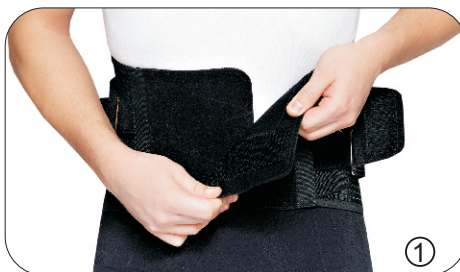

Изделие медицинского назначения кл. 1  
- удовлетворяющее всем требованиям Европейской Директивы 93/42 / EWG. Регистрационный номер производителя в Едином Реестре Лекарственных Продуктов и Медицинских Изделий в Варшаве : PL/CA01 05556  
Для каждого изделия производитель предъявляет декларацию соответствия.

Срок хранения : НЕ ОГРАНИЧЕН

© 2011

**REH4MAT**  
MANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REH4MAT Sławomir Wroński  
ul. Piaski 47; 36-060 Głogów Młp.  
POLAND  
tel.: +48 (17) 851 66 30;  
tel./fax: +48 (17) 851 62 23  
e-mail: biuro@reh4mat.com  
www.ortezy.pl ; www.reh4mat.com

### ОТДЕЛ ЭКСПОРТА

tel. +48 017 864-04-77,  
fax +48 017 864-04-71;

