


KOD KATALOGOWY	EB-N
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	EB-N
CODE	EB-N
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	EB-N



- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę.  
**EN:** Put the brace on the wrist.

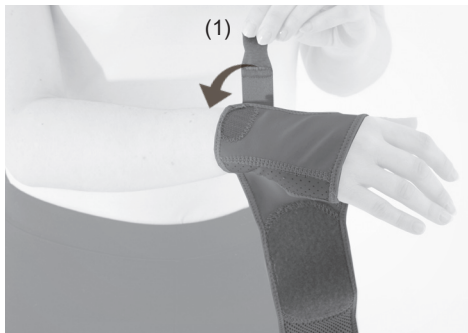

- 2. PL:** Zapnij rzep (1).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (1).



- 3. PL:** Zapnij według wskazanego kierunku.  
**EN:** Fasten according to the indicated direction.



- 4. PL:** Zapnij rzep (2).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (2).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.