


KOD KATALOGOWY	AM-PES-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PES-04
CODE	AM-PES-04
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PES-04

1. **PL:** Załóż ortezę na ramiona (1).  
**EN:** Place the brace on the shoulders (1).



2. **PL:** Za pomocą taśm (2 i 3) ustaw odpowiednią kompresję.  
**EN:** Use the tapes (2 and 3) to set the appropriate compression.

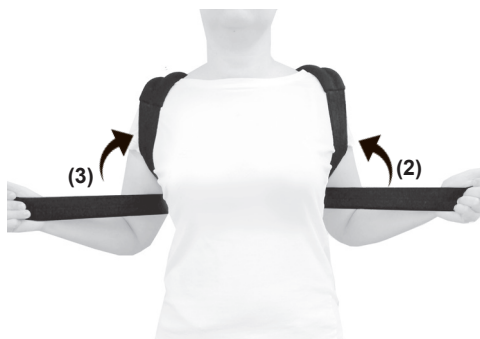

3. **PL:** Zapnij szelki na rzep (4 i 5).  
**EN:** Close the Velcro straps (4 and 5).



**4. PL:** Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość szelek (6). Dopnij rzep zapinający (7) i zapnij (8).

**EN:** If necessary, cut off the needless part of the straps (6). Attach the Velcro fastener (7) and close the straps (8).



**5. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.



**PL: UWAGA!** Istnieje możliwość odpinania klamerek umieszczonych na tylnej pelocie w celu szybkiego i samodzielnego ściągania ortozy.

**EN: ATTENTION!** It is possible to detach the buckles on the back part for quick and independent removal of the orthosis.