


KOD KATALOGOWY	AM-GJ-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	TORSO SUPPORT AM-GJ-01
CODE	AM-GJ-01
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-GJ-01



1. PL: Rozepnij ortezę w celu dopasowania jej do pacjenta.

EN: Unfasten the brace to adjust it to the patient.

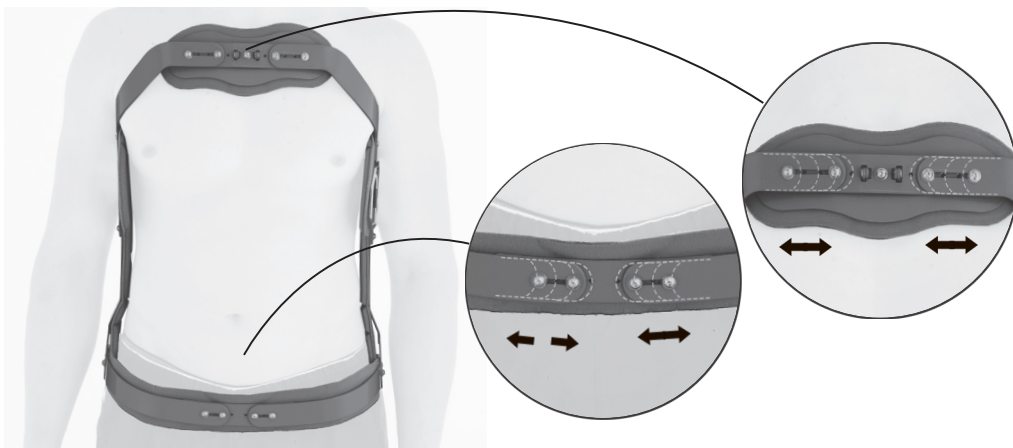


2. PL: Przy pomocy klucza imbusowego, dokonaj regulacji szerokości ramy górnej i dolnej.

EN: Using an Allen wrench, adjust the width of the upper and lower frames.

PL: UWAGA! Zwróć uwagę na to, aby regulacji dokonać symetrycznie po obu stronach wyrobu.

EN: ATTENTION! Make sure that the adjustments are made symmetrically on both sides of the product.

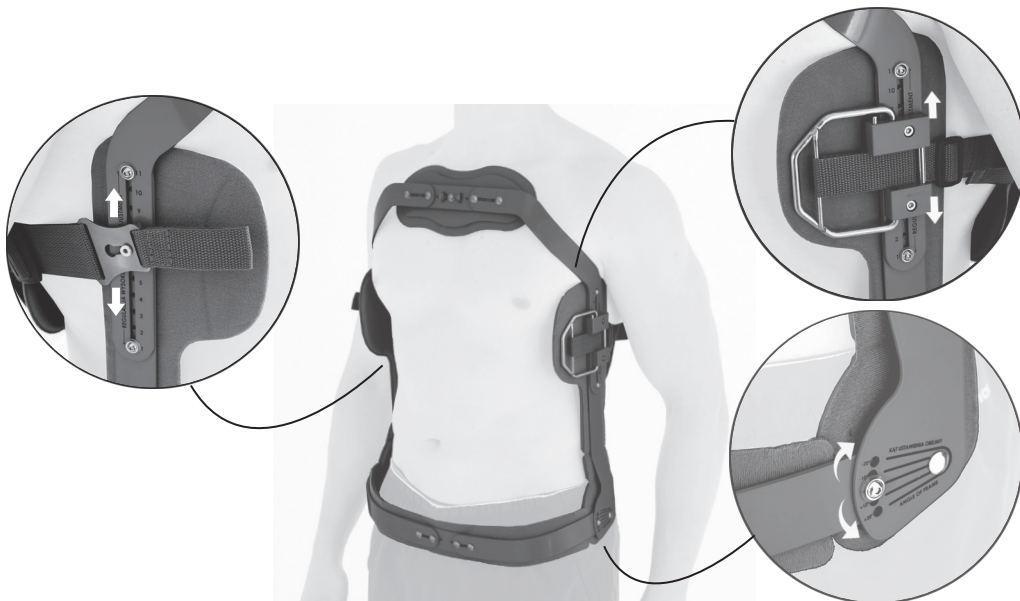

- 3. PL:** Przy pomocy klucza imbusowego dokonaj regulacji wysokości ramy bocznej oraz kąta nachylenia ramy łonowej.

UWAGA! Zwróć uwagę na to, aby regulacji dokonać symetrycznie po obu stronach wyrobu. Rama łonowa może funkcjonować w sposób wahlwy ułatwiający siadanie.

EN: Use an Allen wrench to adjust the height of the side frame and the angle of the pubic frame.

ATTENTION! Make sure that the adjustment is made symmetrically on both sides of the product. The pubic frame can be swung to facilitate sitting down.



- 4. PL:** Przyłóż pelotę (1) do pleców w odpowiednim miejscu.

UWAGA! Istnieje możliwość ustawienia peloty pionowo lub poziomo.

EN: Put the pad (1) on your back in the right place.

ATTENTION! It is possible to set the pelotte vertically or horizontally



5. PL: Zapnij gorset na klamrę (2), za pomocą regulatorów (3,4) ustaw odpowiednią długość taśmy.

EN: Fasten the corset with the buckle (2), using the adjusters (3,4) set the appropriate length of the strap.



6. PL: Za pomocą napinacza (5) ustaw odpowiednie napięcie i zapnij wyrób.

EN: Use the tensioner (5) to set the appropriate tension and fasten the product.



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.