


KOD KATALOGOWY	AM-SOB-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-SOB-01
CODE	AM-SOB-01
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-SOB-01

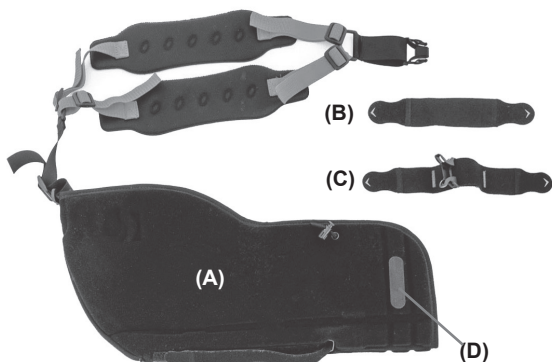




- (A) Rękaw / Sleeve
- (B) Taśma z rzepami / Velcro tape
- (C) Taśma z klamerką / Tape with a buckle
- (D) Rzep / Velcro




1. PL: Rozepnij ortezę i umieść rękę w rękawie (1). Ustaw odpowiednią długość uchwytu dłoniowego za pomocą regulatorów (2) i taśmy pod rękawem (3). Jeśli istnieje potrzeba, odwiń rękaw na zewnątrz i przypnij do rzepów (D).

EN: Unfasten the brace and place your hand in the sleeve (1). Set the appropriate length of the palm grip using the adjusters (2) and the strap under the sleeve (3). If necessary, unwrap the sleeve outside and attach it to the Velcro (D).

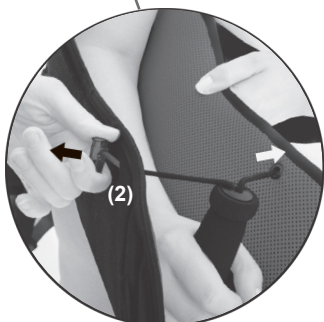

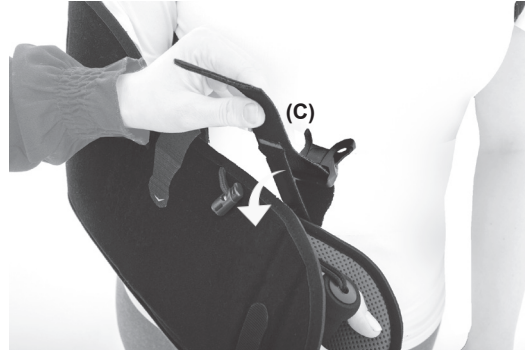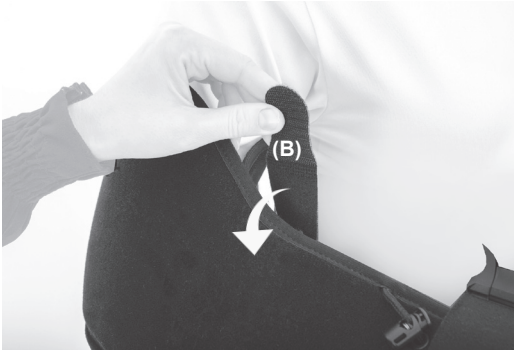


- 2. PL:** Zapnij rękaw za pomocą taśmy z rzepami (B) i taśmy z klamerką (C).
EN: Fasten the sleeve with Velcro (B) and the buckle (C).

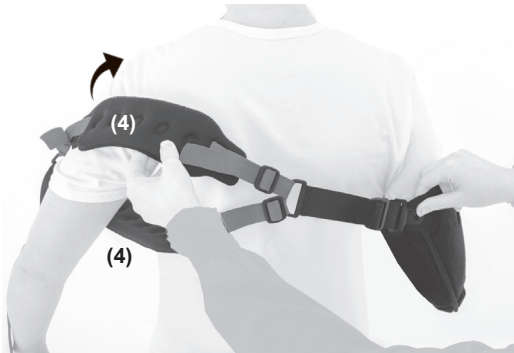

- 3. PL:** Umieść peloty odciążające (4) na ramieniu i pod pachą.
EN: Place the relief pads (4) on the arm and under the armpit.

- 4. PL:** Przypnij taśmę do klamerki (5) przy rękawie.
EN: Attach the tape to the buckle (5) on the sleeve.

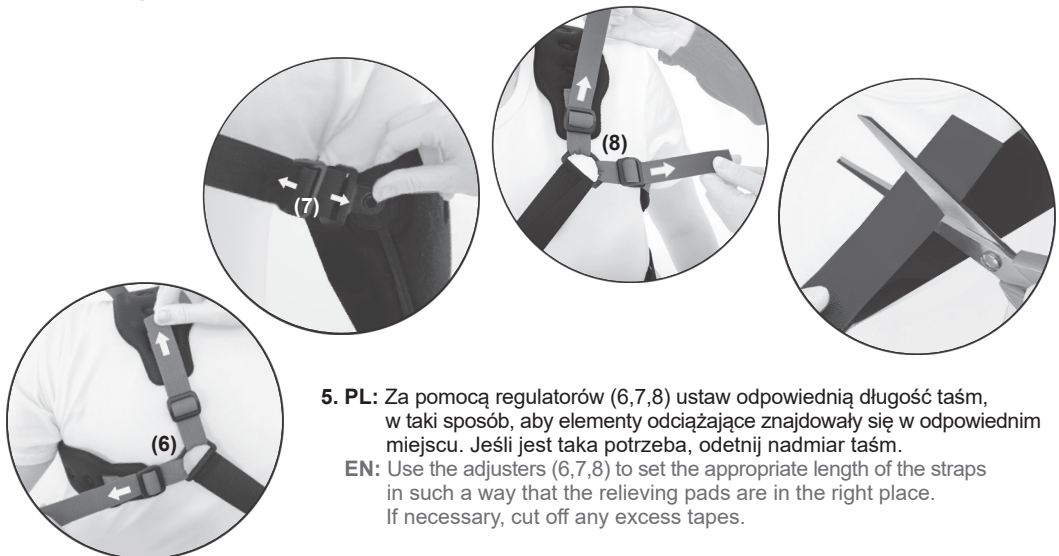

- 5. PL:** Za pomocą regulatorów (6,7,8) ustaw odpowiednią długość taśm, w taki sposób, aby elementy odciążające znajdowały się w odpowiednim miejscu. Jeśli jest taka potrzeba, odetnij nadmiar taśm.
EN: Use the adjusters (6,7,8) to set the appropriate length of the straps in such a way that the relieving pads are in the right place. If necessary, cut off any excess tapes.



6. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.